

# アップルウォッチペアリング設定

## アプリをインストールします。

アップルウォッチのアプリストアで“SmartDrive”と検索してアプリをインストールして下さい。




インストール時にプライバシーとセキュリティのBluetoothをオンにしてください。




## プライバシーとセキュリティ内のBluetoothのスマートドライブをオンにする

オンにしなかった場合は下記より設定をオンにしてください。

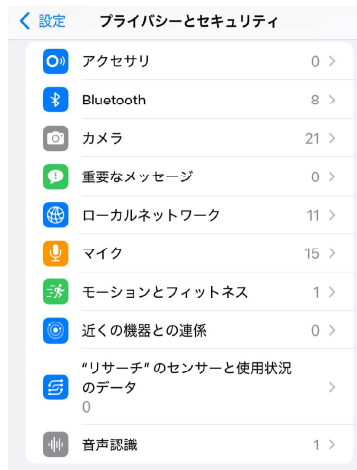

## Bluetooth内のPushTracherをONにします。

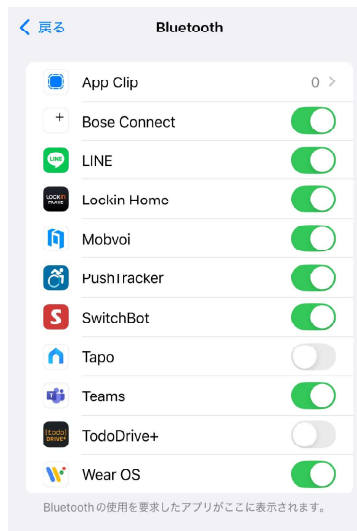

## ペアリングで繋がらない場合

アップルウォッチMX2アプリの

設定、無視するで一旦解除してから再ペアリング

