

# ギャラクシーウォッチGALAXY Watch設定ペアリング設定

ウォッチのプレストアから"Smartdrive MX2+"アプリを探し、インストールします。



アプリがインストールされたら、アプリを開いて設定を確認します。



ウォッチの設定に入ります



設定内のアプリを選択します。



アプリリストを選択します。



SmartDriveMX2+（スマートドライブ）を探し、選択します。



権限を選択します。



アプリの権限の項目をすべて許可するとなりように設定を1ずつ確認して変更が必要でしたら許可へ変更してください。



変更後はアプリを起動してペアリングしてください。繋がらない場合はスマートウォッチを再起動して再度試して下さい。

