

取り付け

スピードコントロールダイヤルの取り外し

車椅子フレームに直接クランプする場合

1. SmartDriveの電源を切り、SpeedControl Dialをモーターから外します。



2. スピードコントロールダイヤルケーブルを固定しているベルクロやケーブルタイを取り外します。



3. 金属製クランプバンドの六角ナットを、マイナスドライバーまたは6mmスパナで緩めて取り外します。



4. 金属製クランプバンドを曲げて、スピードコントロールダイヤルと取り付け金具を車椅子フレームから外します。
バンドを曲げて持ち上げ、取り外します。



スピードコントロールダイヤルの取り外し

延長アームに取り付けた場合

1. SmartDriveの電源を切り、スピードコントロールダイヤルのプラグを本体から外してください。



2. スピードコントロールダイヤルケーブルを固定しているベルクロや結束バンドを取り外してください。



3. 付属の六角レンチを使用して、延長アームの背面から六角ネジを緩めて取り外してください。



4. 延長アームからスピードコントロールダイヤルを取り外してください。



スピードコントロールダイヤルの取り外し

延長アームに取り付けた場合

5. 金属製クランプバンドの六角ナットを、マイナスドライバーまたは6mmレンチで緩めて取り外します。
- レンチを使用して、六角ナットを緩め取り外します。



6. 金属製クランプバンドを曲げてバンドを曲げて持ち上げ、外します。



SwitchControlの取り付け

MX2-TBS または MX2-TBSC

1. SmartDriveの電源を切り、SwitchControl (MX2-TBS) またはモノラルジャック付き SwitchControl (MX2-TBSC) キットを開封してください。



2. 最初のSwitchControlボタンの必要な位置を確認してください。



3. 付属のベルクロストラップまたは結束バンドでSwitchControlボタンを固定してください。



4. MX2-TBSの場合：2つ目のSwitchControlボタンで同様の手順を繰り返します。

MX2-TBSCの場合：モノラルジャックソケットをセカンダリボタン用に適切な位置に配置します。



SwitchControlの取り付け

MX2-TBS または MX2-TBSC

5. 固定式車いす:

ケーブルを座張りの上部からSmartDrive
の方向へ配線してください。



折りたたみ式車いす:

ケーブルを車いすの後方へ、両側のサイドフ
レームに沿って配線してください。



6. 固定式車いす:

必要に応じて、ベルクロと結束バンドでケー
ブルを固定してください。



折りたたみ式車いす:

必要に応じて結束バンドでケーブルを固定し
てください。



SwitchControlの取り付け

MX2-TBS または MX2-TBSC

7. 必要に応じて、マグネットホルダーを車いすの手が届きやすい位置に取り付けてください。



8. SwitchControlをSmartDriveに接続し、電源を入れます。



9. ボタンを押してSwitchControlが動作していることを確認してください。青色にLEDが点滅し始めます。



バディボタンキットの取り付け

延長アームの取り付け(MX2-BBB)

1. SmartDriveの電源を切ってください。

モノラルジャック付きSwitchControl (MX2-TBSC) が既に取り付けられていることを確認してください。



2. MX2-BBBキットを開封してください。

車いすのフレームチューブの直径に基づいて、適切なゴムチューブスペーサーを選択してください。



3. 延長アームにネジを挿入してください。



4. 延長アームに金属製クランプバンドを取り付けてください。



ボディボタンキットの取り付け

延長アーム付き新規設置 (MX2-BBB)

5. ゴムチューブスペーサーを挿入する。



6. 延長アームアセンブリを車椅子フレームの所定位置に配置する。



7. 金属製クランプバンドを六角ナットで固定する。マイナスドライバーまたは6mmスパナで締め付ける。



8. ボディボタンアセンブリを延長アームの先端に配置する。六角頭ネジと付属の六角レンチで固定するキーで固定する。



ボディボタンキットの取り付け

延長アーム付き新規設置 (MX2-BBB)

9. バディ ボタンを SwitchControl モノラルジ
ャックソケットに接続する。



10. 必要に応じてベルクロやケーブルタイ
でケーブルを固定します。



11. SmartDriveの電源を入れます。



12. ボタンを押してSwitchControlが動作
していることを確認します - 青色LED
が
点滅を開始します。



バディボタンキットの取り付け

既存のSCD取り付け金具を保持する

1. SmartDriveの電源を切り、SpeedControl Dialを本体から外してください。



2. SpeedControlダイアルの取り外し方法については、取扱説明書を参照してください。



3. モノラルジャック付きSwitchControl (MX2-TBSC) の取り付け手順を参照してください。



4. バディボタンアセンブリを金属製クランプバンド (標準マウント) または延長アームの先端に取り付けます。



ボディボタンキットの取り付け

既存のSCD取り付け金具を保持する

5.ボディボタンをSwitchControlモノラルジャックソケットに接続してください。



6.必要に応じて、ケーブルをベルクロやケーブルタイで固定してください。



7. SmartDriveの電源を入れます。



8.ボタンを押してSwitchControlが動作していることを確認してください - 青色LEDが点滅を開始します。

