

ROHO®

2026

Apr.

ロホクッション総合カタログ



permobil

2026年4月発行

「補装具費支給事務取扱指針について」の一部改正について(5ページ目、一部抜粋)

別表に定める製作要素及び完成用部品によることができない構成要素が1つのみである場合は、特例補装具の定めにかかわらず、「一部特例」として、基準内の補装具として支給判定して差し支えない。なお、姿勢保持装置、車椅子及び電動車椅子において市販のクッション(カタログに材質、構造及び価格が明記されているものに限り、平面形状型及びモールド型を除く。)を支給する場合及び重度障害者用意思伝達装置において市販のスイッチ(カタログに構造、機能及び価格が明記されているものに限り)を支給する場合、一部特例を判断する構成要素の数に含めることなく「一部特例」として算定すること。上記に示した構成要素の数を超える場合は、従来どおり特例補装具として扱うこと。

【例】

・車椅子の支給に際し、特殊空気室構造の市販のクッション及び肘当てのU字加工を処方した場合、別表によらない構成要素の数は1つとなるので、「一部特例」とし、基準内の補装具として支給して差し支えない。(クッションは構成要素の数に含めないため。)

【参照】令和8年度 補装具費支給事務取扱指針

<https://www.mhlw.go.jp/content/001683856.pdf>

「補装具費支給事務取扱要領」の一部改正について(58ページ目、一部抜粋)

市販品のクッションについては、平面形状型及びモールド型にあつては、告示に定める上限価格の範囲内であることがメーカーカタログ等において確認できるものに限り、カタログ価格の範囲内で算定することができることとし、他の構造のものにあつては、メーカーカタログ等において価格を明記しているものに限り、カタログ価格の範囲内で算定することができること。

【参照】令和8年度 補装具費支給事務取扱要領

<https://www.mhlw.go.jp/content/001683857.pdf>



もくじ

ページ

ロホクッション その背景にある科学 4-6


クッション

1バルブ	8-9
セレクトシリーズ	10-11
スマートシリーズ	12-13
ハイブリッドシリーズ	14-15
2バルブ	16-17
カスタムクッション	18-19
その他のクッション製品	20-21
特殊機能製品と付属品	22-25
マットレス	27-28

資料編

採寸の手引き	29-30
クッションサイズ表	32
製品比較表	33
ご使用とお手入れ	34
返品・保証・品質管理	34
商標	35
価格表	36-50

ロホ製品 その背景にある科学

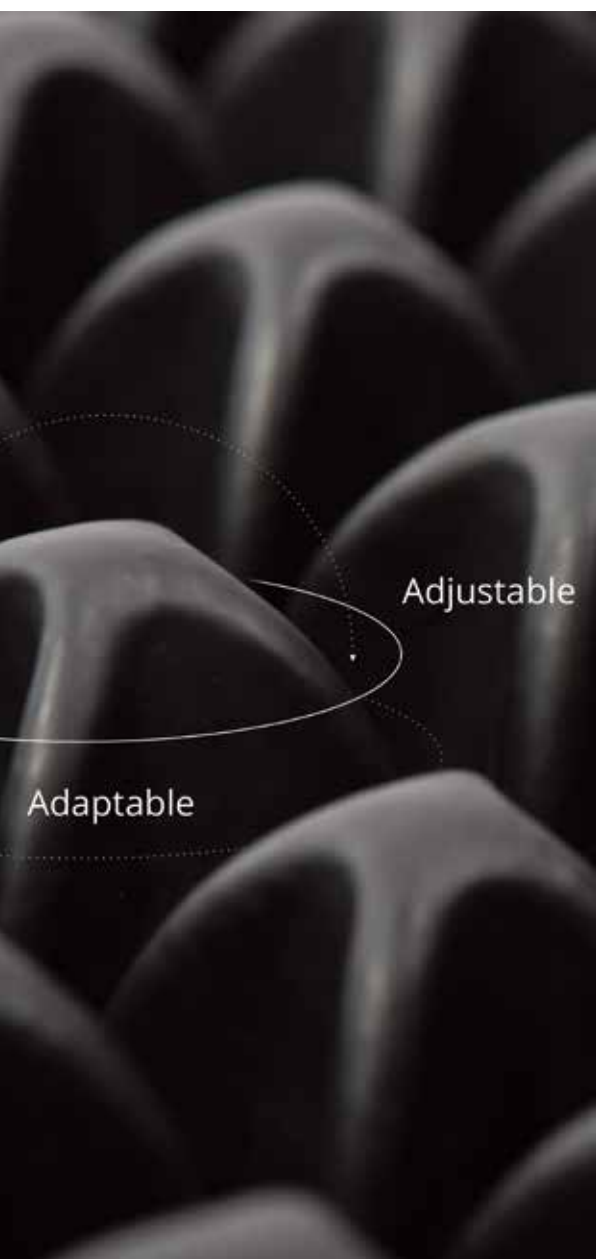

床ずれは痛みを伴うだけでなく、合併症を引き起こす場合があります。また、条件によっては数分から数時間で症状が悪化しますが、早期に気づいて対処することが大切です。

床ずれの根絶をめざし、ロホが活用する技術のひとつが ROHO® Shape Fitting Technology® (ロホ・シェイプフィッティング・テクノロジー) です。ロホ製品独自の「エアセル」は、水が持つ圧力再分配特性を再現し、体型に合わせて自在に形状を適合させる特性を持っています。そのため、床ずれの最大の原因である摩擦やずれが軽減されます。


ロホ・シェイプフィッティング・テクノロジーを搭載した製品は、皮膚の保護や軟部組織へ座位調整が必要な方に、安心と快適さをご提供いたします。

最高の結果を得るために、ぜひロホ製品をご活用ください。

- 皮膚・軟部組織に対する優れた保護力
- より長時間の安全な座位
- ポジショニングと安定性

医学的根拠に基づいた最高のクッションを

ロホは、40年以上にわたって医師や専門家から支持されてきました。市場における数十年の経験と、90を超える学術研究・臨床試験が、ロホ製品の効果の証です。

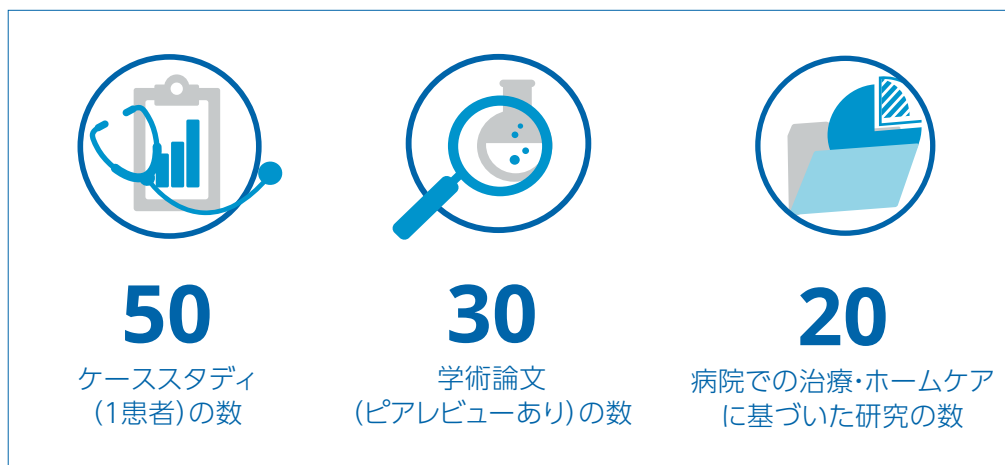

製品における科学的根拠の研究数としてはトップクラスです。

100万を超えるロホ製品が70か国以上で使用されています。
安心してご利用いただけます。

DRY FLOATATION® (ドライフローテーション)テクノロジーを搭載しているのはロホ製品だけです。

ドライフローテーション・テクノロジーは軟部組織の変形を最小限に抑え、血行を妨げることなく理想的な環境を提供します。

床ずれの軽減や術後創にロホクッションが最適であることは、多くの研究から明らかです。

品質と確かな効果が、ペルモビールの礎となる考え方です。ロホ製品が常に最高の結果を実現できるよう、ペルモビールは業界をリードする臨床研究に多くのリソースを投入しています。また、継続的に改善をはかり、業界トップの性能を維持するため、専門家による「Scientific Advisory Board for Pressure Injury (床ずれのための学術諮問委員会)」を設置しました。その取り組みと研究が、社内研修や教育から研究開発に至る当社の原動力になっています。

ロホクッション:

比較対象として平らなウレタン*と比べ、組織損傷リスクの軽減に高い効果が期待されます**。

41% 体型に順応して変形することにより、体組織ストレスが減少します**

57% 比較対象のウレタン*よりも深い沈み込みを確保して、筋委縮などの廃用性症候群、骨形状の適応、瘻性、肥満、瘢痕から体組織を保護します。**

*線形の弾性特性と等方性があり、ポアソン比0.3、弾性係数7ないし10kPaのウレタンを比較対象としています。

**Gefen, et al. (JVT 2014)

ドライフローテーション・テクノロジーの4つの基礎原理

ロホ・ドライフローテーション・テクノロジーは流体静力学(静止した流体を扱う学問)に基づき、4つの原理で皮膚を保護し、快適さを確保しています。


①沈み込みを許す(表面の張力が低い)

特徴:接触時、座面が容易に沈み込む。

当社独自の設計による適度な沈み込みにより、皮膚や軟部組織の圧迫と不快感を取り除きます。



▶動画はこちら

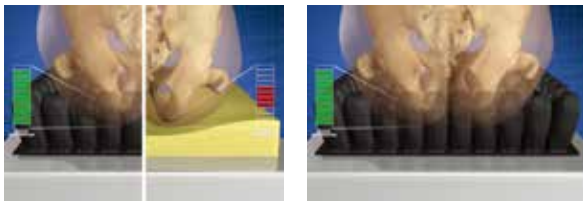

②身体の形状にフィット


(常に元の形状に戻ろうとする力)

特徴:流体からの浮力によりすべての接点に均等で一定の力が伝わる。

体の形状は、人それぞれです。ロホクッションは体の形状や位置の変化に常に追従します。



▶動画はこちら

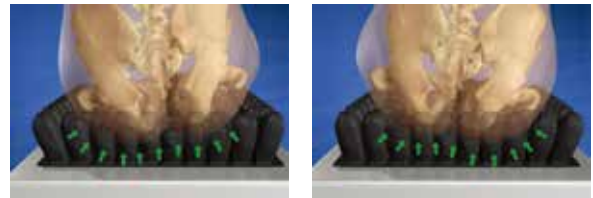


③身体の動きに追従(動きの自由度が高い)

特徴:動きの自由度。

場面を問わず、姿勢にフィットします。エアセルが体の動きに追従し、動きの自由度を損なうことなく体重を支えます。



▶動画はこちら

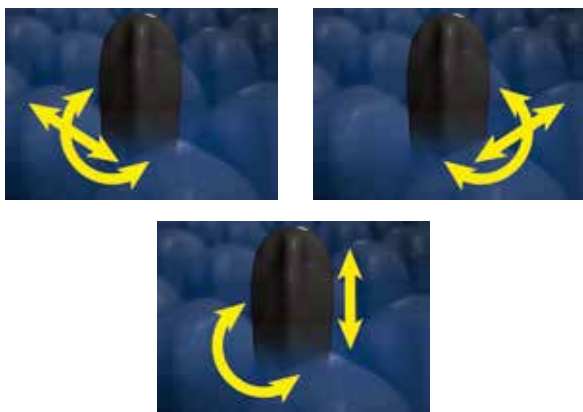

④身体の動きに抗しない


(摩擦やせん断の作用が小さい)

特徴:摩擦は動きに抵抗するような2つの面に働く力、せん断はそれぞれ反対に引っ張られるものに生じる作用。ロホではこれらの作用が小さい。

ロホクッションは体の動きに追従します。なめらかな表面が、安全性や快適性を損なわずに、摩擦やせん断の作用を軽減します。



▶動画はこちら

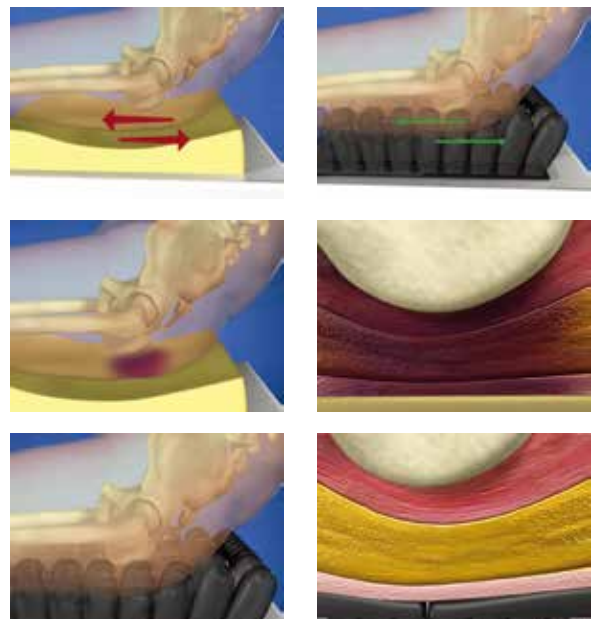



クッション

ロホクッションはお使いになる方、座る場所を問わず、あなたらしさを実現するために設計されています。当社独自のドライブローテーションテクノロジーが、移動時も常に体の形状に沿って快適な姿勢を維持します。

1バルブ

セレクトシリーズ

スマートシリーズ

ハイブリッドシリーズ

カスタムクッション

2バルブ

その他のクッション製品

特殊機能製品と付属品





1バルブクッション

ドライフローテーション・テクノロジーは体圧を分散して摩擦とずれを軽減します。1バルブシリーズのクッションは体の形状にフィットし、組織の変形を最小限に抑えます。



1バルブ



□ホ・ハイタイプ

希望小売価格
¥69,700(税抜き)

ハイタイプのエアセルが最大限の沈み込みと包み込みをもたらし、体圧分散によって摩擦とずれを軽減します。

空気圧の調整が簡単で、体の形状にフィットし、組織の変形を最小限に抑えます。

対象となる方*
骨盤のゆがみ(7.5cmまで)に対する調整が必要な方

皮膚の保護、最大限の沈み込みと包み込みが必要な方

サイズ
幅:26.5cm ~ 70cm
奥行:26.5cm ~ 65.5cm
高さ:10.5cm

構造
特殊空気室構造クッション

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、カバー:スペーサーファブリック

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております



□ホ・ミドルタイプ

希望小売価格
¥69,700(税抜き)

ミドルタイプのエアセルが沈み込みと安定性の理想的なバランスを実現します。

体圧を分散し、摩擦とずれを軽減します。空気圧の調整が簡単で、体の形状にフィットし、組織の変形を最低限に抑えます。

対象となる方*
骨盤のゆがみ(5cmまで)に対する調整が必要な方

皮膚の保護、最大限の沈み込みと包み込みが必要な方

サイズ
幅:31cm ~ 52.5cm
奥行:31cm ~ 52.5cm
高さ:8.5cm

構造
特殊空気室構造クッション

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、カバー:スペーサーファブリック

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております



□ホ・ロータイプ

希望小売価格
¥69,700(税抜き)

低いエアセルは相互に接続されており、クッション上での動きに伴う摩擦とずれを軽減します。アクティブなライフスタイル向けです。

ロータイプはオフィスチェア、カーシート、シャワー用車いすなど、クッション機能や保護が必要な場面で、補助用クッションとしても使用できます。

サイズ
幅:26.5cm ~ 61cm
奥行:26.5cm ~ 52.5cm
高さ:5.5cm

構造
特殊空気室構造クッション

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、カバー:スペーサーファブリック

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております



セレクトシリーズ

クアドトロセレクト および コンツァーセレクト

クッションには独立した4つの空気室があり、当社独自のISO FLO[®](アイソフロー)バルブで制御することによって、それぞれが1人ひとりに適した形状になります。

ロホ・アイソフローバルブ(クッション前部)から、クッションに空気を注入する方法は、以下の2通りです。



アイソフローバルブ「開」
(緑のボタンを押す)

ロホ・1バルブクッション同様、
空気はクッション全体に流れ込みます。




アイソフローバルブ「閉」
(赤のボタンを押す)

空気は4つのセクションに分かれ、
前後左右の座位調整が可能になります。

セレクトシリーズのクッションには、安定性、座位調整機能、快適性、使いやすさを損なうことなく皮膚・軟部組織を保護する機能が標準装備されています。床ずれを軽減することで、治療をサポートします。

QUADTRO SELECT® (クアドトロセレクト)クッション

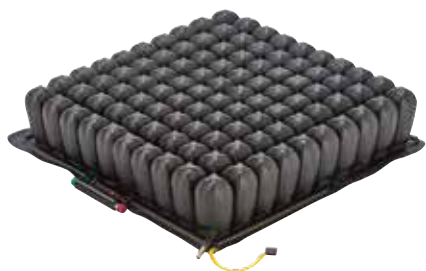

ロホ・クアドトロセレクト ハイタイプ

希望小売価格
¥66,900(税抜き)

連結したハイタイプのエアセルが最大限の沈み込みで体を包み、皮膚の保護、座位、安定性、快適性を実現します。

対象となる方*
骨盤のゆがみ(前後または左右7.5cmまで)に対する調整、骨盤または下肢の姿勢調整が必要な方

サイズ
幅:26.5cm ~ 65.5cm
奥行:26.5cm~65.5cm
高さ:10.5cm

構造
特殊空気室構造クッション

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、アイソフローバルブ:ポリプロピレン、ポリカーボネート、アルミニウム、カバー:スパーサーファブリック

保証期間
クッション:36ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております



ロホ・クアドトロセレクト ミドルタイプ

希望小売価格
¥66,900(税抜き)

連結したミドルタイプのエアセルが、座位と安定性のカスタマイズという理想的な組み合わせを叶えます。

対象となる方*
骨盤のゆがみ(前後または左右5cmまで)に対する調整、骨盤または下肢の姿勢調整が必要な方

サイズ
幅:31cm ~ 52.5cm
奥行:31cm ~ 52.5cm
高さ:8.5cm

構造
特殊空気室構造クッション

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、アイソフローバルブ:ポリプロピレン、ポリカーボネート、アルミニウム、カバー:スパーサーファブリック

保証期間
クッション:36ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております



ロホ・クアドトロセレクト ロータイプ

希望小売価格
¥66,900(税抜き)

連結したエアセルが安定した座位を提供します。オフィスチェア、スポーツ機材、カーシートなど、クッション機能や保護が必要な場面で、補助用クッションとしても使用できます。

サイズ
幅:22cm ~ 61cm
奥行:26.5cm ~ 52.5cm
高さ:5.5cm

構造
特殊空気室構造クッション

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、アイソフローバルブ:ポリプロピレン、ポリカーボネート、アルミニウム、カバー:スパーサーファブリック

保証期間
限定クッション:36ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております

CONTOUR SELECT® (ロホ・コンツァーセレクト)クッション

希望小売価格
¥65,900(税抜き)



座位と姿勢の調整用に設計されており、クッション中央で安定してまっすぐな座位を維持します。

- 脚部の適正なアライメントと骨盤の安定性を確保
- アイソフローバルブにより、使用する方に合わせた左右、前後方向の細かい調整が可能
- 安定性
- 座位調整

サイズ
幅:31cm ~ 61cm
奥行:35cm ~ 57cm
高さ:約5.5cm ~ 10.5cm

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、アイソフローバルブ:ポリプロピレン、ポリカーボネート、アルミニウム、カバー:スパーサーファブリック

構造
特殊空気室構造クッション

保証期間
クッション:36ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

スマートシリーズ

ロホ・スマートチェック

空気量チェックシステム

ひと目で空気量がわかるシステムです。

スマートチェック対応のロホクッションに接続。チェックボタンを押しランプの色を見るだけで空気量がわかります。

保証期間:24か月

- 適切な空気圧を記憶
- ボタンを押すだけで空気圧レベルをチェック可能
- 緑ランプなら適正
- 取り外して可能





**ロホ・ハイタイプ
(スマートチェック用)**
1バルブ・スマートチェック用
クッション

希望小売価格
¥68,700(税抜き)

※スマートチェックは別売りになります。

連結したハイタイプのエアセルが体を包み、体圧を分散して摩擦やずれを低減します。

高さのあるエアセルによって体との接触面積が大きくなり、たっぷりとした沈み込みと包み込みを提供します。

対象となる方*
骨盤のゆがみ(7.5cmまで)に対する調整が必要な方

サイズ
幅:26.5cm ~ 70cm
奥行:26.5cm ~ 57cm
高さ:10.5cm

構造
特殊空気室構造クッション

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、カバー:スペーサーファブリック

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております



**ロホ・ミドルタイプ
(スマートチェック用)**
1バルブ・スマートチェック用
クッション

希望小売価格
¥68,700(税抜き)

※スマートチェックは別売りになります。

連結したミドルタイプのエアセルがロホ・ドライブローテーションのシェイプフィッティング・テクノロジーにより理想的な沈み込みと皮膚の保護を可能にします。

エアセルの形状と座面の沈み込みは、常に動作に追従します。

対象となる方*
骨盤のゆがみ(5cmまで)に対する調整が必要な方

サイズ
幅:31cm ~ 61cm
奥行:31cm ~ 57cm
高さ:8cm

構造
特殊空気室構造クッション

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、カバー:スペーサーファブリック

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております



**ロホ・ハイブリッドエリート
(スマートチェック用)**
1バルブ・スマートチェック用
クッション

希望小売価格
¥66,900(税抜き)

※スマートチェック用は通常仕様の1バルブクッションと兼用になります。また、スマートチェックは別売りになります。

ロホ・ドライブローテーションのシェイプフィッティング・テクノロジーによる最新のクッションは、皮膚・軟部組織保護と、立体成型のウレタンベースによる安定性と座位保持機能を兼ね備えています。

体の形状にフィットするエアクッションが、骨盤に重要な体圧分散を可能にします。

対象となる方*
骨盤のゆがみ(5cmまで)に対する調整、骨盤または下肢の位置調整、移動時の安定性が必要な方

サイズ
幅:35.5cm ~ 61cm
奥行:35.5cm ~ 51cm
高さ:11cm

構造
臀部構造:特殊空気室構造
その他:平面形状(多層構造)

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、フォームベース:独立気泡ポリエチレンフォーム、フォームインサート:発泡ポリウレタン、カバー:スペーサーファブリック

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
225kg

*あくまで目安として記載しております



ハイブリッドシリーズ

ロホ・ドライブローテーションのシェイプフィッティング・テクノロジーによる皮膚・軟部組織の保護と、立体成型のウレタンベースによる安定性を兼ね備えた最新のクッションです。

立体成型のウレタンベースは、移動時の安定性が向上するよう設計されており、快適性、座位保持、安定性を確保しています。

- さらなる安定性と皮膚・軟部組織の保護のために、エアクッションとウレタンベースを組み合わせました。
- 立体成型のウレタンベースが大腿部の内外側をサポートし、脚を適切な姿勢で保持します。
- 移動の際のしっかりとした基礎となります。





ロボ・ハイブリッドエリート (スマートチェック用)

1バルブクッション

希望小売価格

¥66,900(税抜き)

※スマートチェック用は通常仕様の、1バルブクッションと兼用になります。また、スマートチェックは別売りになります。

ロボ・ドライフローテーションのシェイプフィッティング・テクノロジーによる最新のクッションは、皮膚・軟部組織の保護と、立体成型のウレタンベースによる安定性を兼ね備えています。

体の形状に順応するエアクッション部が、骨盤にとって重要な圧力分散を可能にします。

対象となる方*

骨盤のゆがみ(5cmまで)に対する調整が必要な方
骨盤と下肢の座位調整が必要な方
移動時の安定性が必要な方

サイズ

幅:35.5cm ~ 61cm
奥行:35.5cm ~ 51cm
高さ:11cm

構造

臀部構造:特殊空気室構造、その他:平面形状(多層構造)

素材

クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、フォームベース:独立気泡ポリエチレンフォーム、フォームインサート:発泡ポリウレタン、カバー:スパーサーファブリック

保証期間

クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重

225kg

*あくまで目安として記載しております



ロボ・ハイブリッドエリート

2バルブクッション

希望小売価格

¥66,900(税抜き)

ロボ・ドライフローテーションのシェイプフィッティング・テクノロジーによる最新のクッションは、皮膚・軟部組織の保護と、立体成型のウレタンベースによる安定性を兼ね備えています。

2つの空気室があるクッションが、骨盤にとって重要な圧力分散を可能にします。

2つの空気室が独立しているため、骨盤の左右方向の傾斜を軽減、または調整することができます。

対象となる方*

骨盤のゆがみ(5cmまで)の調整が必要な方
左右方向の座位調整が必要な方
移動時の安定性が必要な方

サイズ

幅:36cm ~ 51cm
奥行:36cm ~ 51cm
高さ:11cm

構造

臀部構造:特殊空気室構造、その他:平面形状(多層構造)

素材

クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、フォームベース:独立気泡ポリエチレンフォーム、フォームインサート:発泡ポリウレタン、カバー:スパーサーファブリック

保証期間

クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重

225kg

*あくまで目安として記載しております



2バルブクッション

それぞれに圧力調整が可能な2つの空気室が、皮膚・軟部組織の保護に必要なさらなる安定性をもたらし、ダブルバルブならではの座位調整を可能とします。





□ホ・エンハンサー

希望小売価格
¥68,700(税抜き)

高さの異なる空気室を2つのセクション(坐骨と脚を受ける凹み部分と大腿部内外側を支える部分)として配置しています。

これにより骨盤と脚の姿位を保持し、安定性を確保すると同時に、皮膚・軟部組織を適切に保護します。

□ホ・エンハンサーは、坐骨支持部分のアイソレーションが可能な唯一の□ホクッションで、大転子周りの外側の支持を強化しています。

対象となる方*
骨盤と下肢の座位調整が必要な方

サイズ
幅:35cm ~ 52.5cm
奥行:35cm ~ 52.5cm
高さ:5.5cm ~ 10.5cm
(空気室の高さは部位により異なります)

構造
特殊空気室構造クッション

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、カバー:スパーサーファブリック

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております

ハイタイプ、ロータイプの2バルブクッションは左右の空気圧を個々に調整でき、左右方向の骨盤のゆがみや傾斜をも調整できます。その結果、床ずれの軽減に加え、より優れた座位調整と安定性を実現しています。



□ホ・ハイタイプ (2バルブ)

希望小売価格
¥68,700(税抜き)

ハイタイプ(2バルブ)クッションは2つの空気室の空気圧をそれぞれ調整でき、左右方向のゆがみ(骨盤傾斜など)に対応した座位調整でいっそうの安定性がえられます。

対象となる方*
骨盤のゆがみ(7.5cmまで)の調整が必要な方
外側からの支持を強化したい方
坐骨結節の負荷を部分的に分散する必要がある方

サイズ
幅:35cm ~ 52.5cm
奥行:35cm ~ 57cm
高さ:10.5cm

構造
特殊空気室構造クッション

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、カバー:スパーサーファブリック

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております



□ホ・ロータイプ (2バルブ)

希望小売価格
¥68,700(税抜き)

骨盤や姿勢にトラブルを抱えている場合に、クッション座面全体で安定性がえられます。

左右に体を動かすことが多い、活動レベルの高い方向けに設計された製品です。

オフィスチェア、スポーツ機材、カーシート、シャワー用車いすなど、さらなるクッション機能と保護が必要な場面で使用できます。

サイズ
幅:35cm ~ 52.5cm
奥行:35cm ~ 52.5cm
高さ:5.5cm

構造
特殊空気室構造クッション

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、カバー:スパーサーファブリック

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

*あくまで目安として記載しております



カスタムクッション

カスタムメイドのロホクッションのご提供が可能です。

セルの高さは自由に



バルブはご要望の位置に



快適性、安全性、効果の点で、万人に合った万能製品はありません。それを理解している当社は形状、サイズ、機能のすべてをカスタマイズできる口ホクッションを提供しています。

対象となる方*

バルブや空気室の数を変更し、左右、前後のさらに細かな座位調整が必要な方。

エアセルの高さを変え、必要な部位にさらなる安定性と皮膚・軟部組織の保護を確保することで、その効果が期待できる方

標準サイズに対してエアセルの列を増やす、または減らす必要がある方

エアセルを追加または減らす必要がある方

クッションのベースに通風孔やドレーン用の穴を設けることでメリットが得られる方

サイズ
カスタム

構造
特殊空気室構造クッション

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、
空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、カバー:
スペーサーファブリック

保証期間
クッション:24ヶ月

カバー:6ヶ月

耐荷重
製品による

*あくまで目安として記載しております

カスタムクッションは、ご注文内容に応じて設計・見積りいたします。制限事項は標準品と異なる場合があります。



その他のクッション製品

一人ひとりに適した解決策をご提供できるよう、ペルモビールではさまざまな製品をご用意しております。



AIR FLOATATION air insert built into the AirLITE® cushion.



ロホ・エアライト3

希望小売価格
¥31,780(税抜き)

エアライトはメンテナンスフリーのクッションです。柔らかく、快適な使用感を生み出すウレタンベースにエアフローレーション空気式クッション(調整不可)が組み込まれているため、体の形状にフィットし車いすからの転落を防止します。脚部の適度な凹みが、適切な姿勢を保持します。

- メンテナンスフリー
- 座位保持
- 快適性
- 安定性
- 軽量

対象となる方*
骨盤と下肢の座位調整が必要な方

サイズ
幅:33cm ~ 51cm
奥行:33cm ~ 51cm
高さ:5cm ~ 9.5cm

構造
内部構造:特殊空気室構造クッション(ウレタン内部)、その他:平面形状(多層構造)

素材
セグメント構造のポリウレタン空気インサート(調整不可)

保証期間
クッション:24ヶ月

耐荷重
136kg

*あくまで目安として記載しております

ロホ・モザイククッション

希望小売価格
¥15,070(税抜き)

新たな発想で再設計されたコストパフォーマンスの高いモザイククッション。皮膚・軟部組織の保護と同時に、いっそう快適な使用感がえられます。

なめらかな形状と、より効果的な空気流を追求したことにより、違和感を和らげ、より長時間お使いいただけます。

ロホのエアセルテクノロジーを実感していただけるでしょう。

モザイククッションの斬新なデザインが、快適な沈み込みと、完璧なフィット感を可能にしています。さまざまな座面に対応できるようサイズ展開も豊富です。皮膚・軟部組織の保護を提供します。

対象となる方*
骨盤と下肢の座位調整が必要な方

サイズ
幅:40.5cm ~ 51cm
奥行:40.5cm ~ 45.5cm
高さ:約6.5cm ~ 7.5cm

構造
特殊空気室構造クッション

素材
内部構造:難燃性PVC フィルム(DEHP使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、カバー:スぺーサーファブリック

保証期間
クッション:12ヶ月

耐荷重
143kg

*あくまで目安として記載しております

バケーションクッション

希望小売価格
ウルトラレザーカバー付き
¥21,190(税抜き)

キルティングカバー付き
¥13,770(税抜き)

長時間、快適に座るための汎用クッションです。

軽量で折り畳めるため、これまでにない手軽さと快適性を両立しています。エアセル同士が連結しているため、体重が移動しても、空気が移動して体圧を分散してくれます。

カバーは、キルティングカバーとULTRALEATHER® (ウルトラレザー)カバーの2種類からお選びいただけます。

サイズ
幅:45.5cm
奥行:40.5cm
高さ:2.5cm ~ 5.5cm

構造
特殊空気室構造クッション

素材
内部構造:難燃性PVC フィルム(DEHP使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、カバー:スぺーサーファブリック

保証期間
クッション:12ヶ月

重量:0.2kg

*あくまで目安として記載しております



特殊機能製品と付属品

車いすから離れても、床ずれリスクがなくなるわけではありません。

どこにいても保護できるように、ペルモビールでは、すぐれた特殊機能製品を開発しました。

□ホ・トイレシート

□ホ・シャワー・トイレクッション

□ホ・アダプター

□ホ・ミニマックス

□ホ・ソリッドインサート

□ホ・リクライナー



ロボ・トイレシート

希望小売価格
¥37,660(税抜き)

調整可能な空気充填式エアセルデザインのカッションです(ネオプレン製)。トイレ(ポータブル含む)での一時的な使用を目的としており、取り付けやお手入れ、消毒も簡単です。

- 簡単取り付け
- 調整可能
- お手入れと消毒が容易

サイズ
幅:20cm
奥行:40cm
高さ:5.5cm

重量:0.5kg
保証期間
24ヶ月

構造
特殊空気室構造

耐荷重
なし

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、カバー:スペーサーファブリック



ロボ・シャワー・トイレクッション

希望小売価格
¥55,550(税抜き)

ロボ独自のドライブローテーション・テクノロジーを搭載したシャワー・トイレクッション(調整可能)はポータブルトイレ、入浴用車いすに最も必要とされるクッション機能と保護を実現します。カバーなしで使用できるように設計されており、お手入れや消毒も簡単です。

- お手入れと消毒が容易

サイズ
幅:37.5cm ~ 46.5cm
奥行:37.5cm ~ 46.5cm
高さ:5.5cm

重量:0.7kg
保証期間
24ヶ月

構造
特殊空気室構造

耐荷重
なし

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、カバー:スペーサーファブリック



ロホ・アダプター

希望小売価格
¥21,190(税抜き)

平らな面、凹凸のある面のどちらでも、クッション機能と保護機能のある環境に変えられます。エアセル同士は連結されておらず、さまざまな部位の圧迫対策にご活用いただけます。アームレスト、トレイ、フットレストなどに合わせ、切り取ってご使用いただけます。

- 独立したエアセル
- 切り取り可能
- 衝撃吸収

サイズ 幅:25cm
奥行:34cm
高さ:2cm

構造 特殊空気室構造

素材 クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、カバー:スパーサーファブリック

重量:0.2kg

保証期間
24ヶ月

耐荷重
なし



ロホ・ミニマックス

希望小売価格
¥68,700(税抜き)

レクリエーション、スポーツ、入浴、移動など、短時間での使用を目的として設計されています。衝撃を吸収し、皮膚を保護します。空気圧は調整可能です。

- 快適性

サイズ 幅:40.5cm ~ 51cm
奥行:40.5cm ~ 51cm
高さ:3cm

構造 特殊空気室構造

素材 クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、カバー:スパーサーファブリック

重量:0.9kg

保証期間
24ヶ月

耐荷重
なし



ロホ・プライバシーシールド

希望小売価格
¥21,190(税抜き)

車いすの座面から背もたれの下部までを覆います。

ロホ・プライバシーシールドは、車いすの支柱に直接取り付ける点で他社製品とは異なり、ほとんどの車いすにお使いいただけます。取り外しと取り付け、お手入れが簡単です。

保証期間
6ヶ月



ロホ・ソリッドインサート

希望小売価格
¥5,650(税抜き)

ロホクッションのしっかりとした基盤となります。

座位調整に必要な体重支持機能があります。カバー材の合板にポリウレタン樹脂をコーティングしました。わずか0.3cmと、クッションと合わせてカバーに入れやすい厚さです。

- スリングシート of 垂れ下がり を防止

保証期間
クッション:12ヶ月



ロホ・スタンダードシリーズ・セレクトシリーズクッション交換用カバー

希望小売価格
¥9,420(税抜き)

クッションの保護を目的としています。上部は伸縮可能、サイドには立体構造で編みこまれた生地(スパーサーファブリック)を使用し、ファスナーが付属、底面には滑り止め加工を施しています。クッションをしっかりと車いすに固定する面ファスナーが付属します。

保証期間
6ヶ月

備考:セレクトシリーズのカバーにはアイソフローバルブ用の開口部があります。



ロホ・失禁カバー

希望小売価格
¥11,180(税抜き)

クッションの保護を目的とし、耐水性を備えたカバーです。上部は伸縮可能で耐水性があり、サイドにはファスナー、底面には滑り止め加工を施しています。クッションをしっかりと車いすに固定するフ面ファスナーが付属します。

ロホ・失禁カバーは以下のような方にお勧めします。

- より高い耐久性が必要な方
- 失禁対策が必要な方
- オゾン発生器等に晒される環境での使用

保証期間
6ヶ月

修理価格表

	修理項目	修理価格(税抜き)
1	ROHOクッション故障診断 *2	¥4,600
2	パッチ貼り補修(ピンホール修理)	¥4,300
3	セル交換(1箇所 / バルブ交換有り)	¥14,000
4	セル交換(1箇所 / バルブ交換無し)	¥9,500
5	セル交換(2箇所目以降)	¥4,300
6	バルブ交換	¥5,500

* 上記以外の内容は都度お見積りとなります。


* 2:お送り頂く際の送料は含まれておりません。

* 2:修理が行われた際には計上されません。

口ホ®リクライナークッション

長時間の座位も安心。腰痛、床ずれ対策に。

一日中座り続けても、お尻から背中にかけて除圧し、腰痛や床ずれを予防してくれます。
また座部と背部の2枚のクッションを、スナップで留めて使用します。

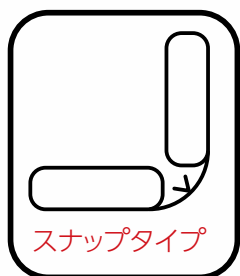

希望小売価格
154,300 円 (税抜き)

座面：幅 8 セル (35 ~ 39.5cm) x 奥行 9 セル (39.5 ~ 44cm)
背面：幅 8 セル (35 ~ 39.5cm) x 背高 13 セル (57 ~ 61cm)
セル高：ハイ (10.5cm)
付属品：専用カバー (1 セット分)、専用ポンプ

構造
特殊空気室構造クッション

素材
クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、空気注入バルブ:Zytel(ナイロン樹脂)、カバー:スパーサーファブリック

保証期間
クッション:24ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
なし

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

マットレス製品

空気式マットレスは、病院、長期療養、自宅での介護などで皮膚・軟部組織の保護に効果的です。

連結した調整可能なエアセルが体の形状にフィットし、組織の変形を最小限に抑えます。ロホ・マットレスは電源不要で、停電時や電源が確保できない状況下においても空気圧と保護機能を維持できます。



* 写真は4セクションの構成となります。

ロホ・ドライブローテーション マットレスシステム

希望小売価格

¥66,380(税抜き)*1セクション当たり

ドライブローテーション・マットレスは流体の圧力分散特性を再現し、床ずれの軽減と治療に理想的な環境を提供します。

電動ポンプを使用していないため、騒音、熱、振動が発生しません。マットレスはモジュラー構造になっており、4つの空気室の圧力をそれぞれ調整できます。

- 体型変化に応じて調整可能
- ドレイン孔付き
- 7cmの沈み込み
- 独立した4つの空気室

対象となる方*

皮膚・軟部組織や深部組織の組織破壊のリスクがある方

床ずれの軽減と治療が必要な方

マットレスのカスタマイズが必要な方

サイズ

幅:86cm

奥行:190.5cm

高さ:8.5cm

構造

特殊空気室構造クッション

素材

クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、ニッケルメッキ真鍮バルブ、プロディジー:難燃性PVC フィルム(DEHP 不使用)、ポリエステル / スパンデックスストラップ

重量:14.5kg

保証期間


マットレス:24ヶ月

カバー:6ヶ月

耐荷重

なし

*あくまで目安として記載しております

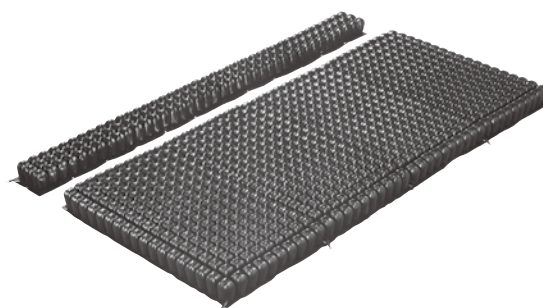

ロホ・ドライブローテーション 大きなサイズ対応キット

オーダーメイド(見積り)

大型のベッドに合わせ、ドライブローテーション・マットレスの幅を拡大する追加用マットレスです。

サイズ例

190.5cm x 100.5cm x 8.5cm

190.5cm x 105.5cm x 8.5cm

190.5cm x 123cm x 8.5cm

190.5cm x 138.5cm x 8.5cm

190.5cm x 152.5cm x 8.5cm

*カスタムサイズもございます。

構造

特殊空気室構造クッション

素材

クッション:ネオプレンゴム(ラテックス不使用)、ニッケルメッキ真鍮バルブ、プロディジー:難燃性PVC フィルム(DEHP 不使用)、ポリエステル / スパンデックスストラップ

保証期間

マットレス:24ヶ月

耐荷重

なし

*あくまで目安として記載しております



ロホ・ソフレックス2 マットレスシステム

希望小売価格
¥160,000(税抜き)

調整可能なエアフローテーションエアセルは体の形状にフィットし、マットレス表面全体に体圧を分散します。ご使用になる方に合わせ、独立した3つの空気室をそれぞれ調整することができます。

電動ポンプを使用していないため、騒音、熱、振動が発生しません。

ポリウレタン製のソフレックス2マットレスは、マットレスカバーまたはリユーズブルカバーと合わせてご使用いただけます。

- 体型変化に合わせて調整可能
- 体位に合わせて調整
- 7.5cmの沈み込み
- お手入れが簡単

対象となる方*
マットレスのカスタマイズが必要な方
皮膚・軟部組織や深部組織の組織破壊のリスクがある方

サイズ
幅:91.5cm
奥行:207.5cm
高さ:9cm

構造
特殊空気室構造クッション

素材
クッション:ポリエーテルポリウレタン、、ニッケルメッキ真鍮バルブ、ポリエステル / スパンデックスストラップ

重量:2.9kg

保証期間
マットレス:18ヶ月
カバー:6ヶ月

耐荷重
150kg

*あくまで目安として記載しております



ロホ・プロディジー マットレスシステム

希望小売価格
¥150,000(税抜き)

独立した3つの空気室はそれぞれ調整でき、さまざまなニーズに対応します。連結した柔らかいエアフローテーションエアセルが体の形状にフィットし、皮膚・軟部組織と深部組織を保護します。

電動ポンプを使用していないため、騒音、熱、振動が発生しません。

底面には水抜き用の孔があり、身体の周りに液体がたまりません。

- 体型変化に合わせて調整可能
- お手入れと修理が簡単
- 7.5cmの沈み込み
- PVC製(DEHP不使用)

対象となる方*
皮膚・軟部組織の組織破壊のリスクがある方

サイズ
幅:91.5cm
奥行:207.5cm
高さ:9cm

構造
特殊空気室構造クッション

素材
クッション:ポリエーテルポリウレタン、、ニッケルメッキ真鍮バルブ、ポリエステル / スパンデックスストラップ

重量:4.3kg

保証期間
マットレス:12ヶ月

耐荷重
136kg

*あくまで目安として記載しております

採寸の手引き



クッションの厚み

標準の空気圧まで空気を充填し、上下、左右に負荷をかけず、シエルがない状態でのクッションの厚みです。

寸法は製品の説明書と製品のラベルにも記載されている場合があります。



クッションの幅

クッションの左右の両端に負荷をかけずに測った寸法です。

寸法は製品の説明書と製品のラベルにも記載されている場合があります。



クッションの奥行

クッションの前後の両端に負荷をかけずに測った寸法です。

寸法は製品の説明書と製品のラベルにも記載されている場合があります。



座幅


クッションの使用に適した座面の幅です。




座奥

クッションの使用に適した座面の奥行です。

クッションの幅と奥行

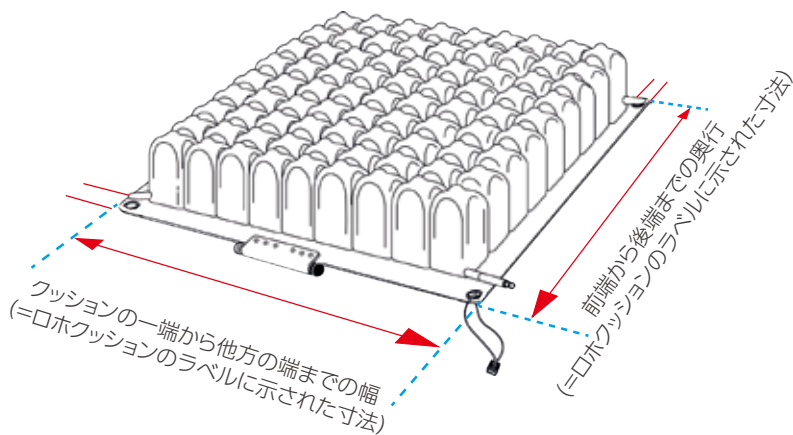

座幅と座奥
セレクトシリーズ クッション

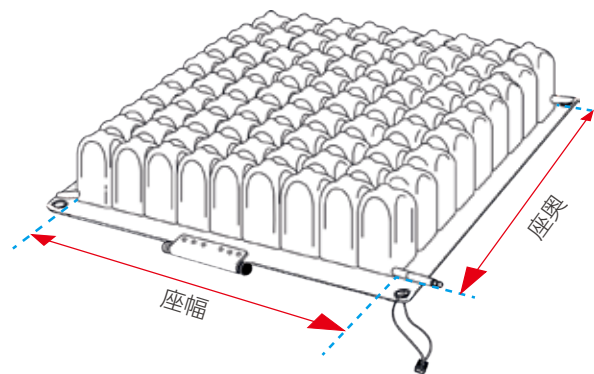

備考:耐荷重がないクッションは、ご使用になる方に適した正しいサイズをご使用ください。

車いすに適した、正しいサイズの
口ホクッションをご使用ください。

ステップ1

車いすの座面の幅と奥行を測ります。
備考:メーカーが公表する座面の寸法とは異なる場合があります。

ステップ2

以下の表と車いすの座面の寸法を照らし合わせて、適切な
エアセルの数を判断します。

ネオプレン製口ホクッションのサイズ選定表


車いすの寸法 (cm)	エアセルの数
22cm ~ 26.5cm	5
26.5cm ~ 31cm	6
31cm ~ 35cm	7
35cm ~ 39.5cm	8
39.5cm ~ 44cm	9
44cm ~ 48.5cm	10
48.5cm ~ 52.5cm	11
52.5cm ~ 57cm	12
57cm ~ 61cm	13
61cm ~ 65.5cm	14
65.5cm ~ 70cm	15

備考:モデルによっては、表に示されたエアセル数のクッション
をご用意できない場合もあります。


※この表は、以下の製品のサイズ選定にご利用いただけ
ます。

- ・ 口ホクッション ハイ/ミドル/ロー
- ・ 口ホクッションスマートチェック用 ハイ/ミドル
- ・ 口ホクアドトロセレクト ハイ/ミドル/ロー
- ・ 口ホコンツァーセレクト
- ・ 口ホエンハンサー

1バルブクッション

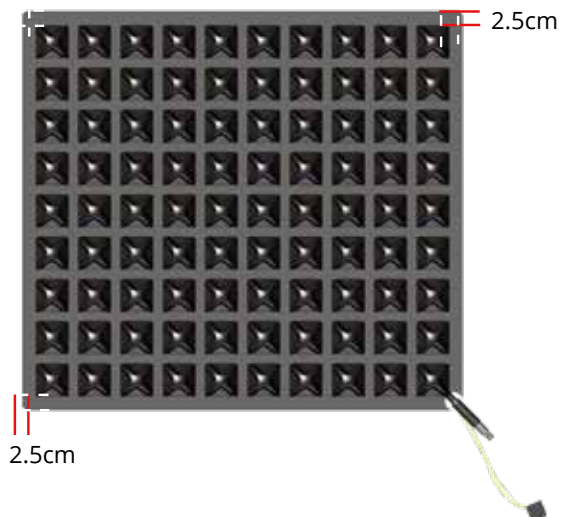

セレクトシリーズクッション

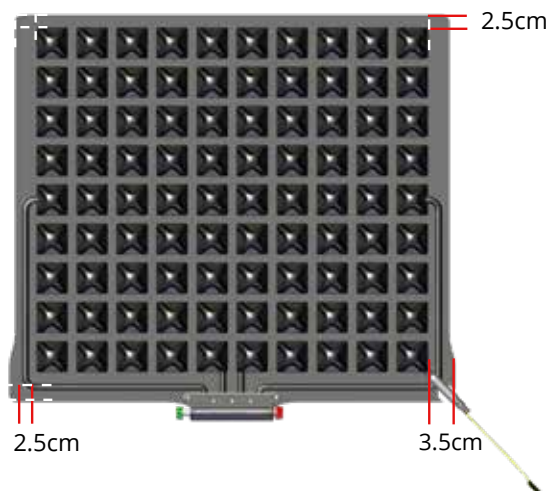



クッションサイズ表(座幅 × 座奥)

ハイブリッドエリートSRクッション

型番	サイズ (in.)	サイズ (cm)
1RHE1414C-SR	14" x 14"	35.5 x 35.5
1RHE1415C-SR	14" x 15"	35.5 x 38
1RHE1416C-SR	14" x 16"	35.5 x 40.5
1RHE1515C-SR	15" x 15"	38 x 38
1RHE1516C-SR	15" x 16"	38 x 40.5
1RHE1517C-SR	15" x 17"	38 x 43
1RHE1615C-SR	16" x 15"	40.5 x 38
1RHE1616C-SR	16" x 16"	40.5 x 40.5
1RHE1617C-SR	16" x 17"	40.5 x 43
1RHE1618C-SR	16" x 18"	40.5 x 45.5
1RHE1620C-SR	16" x 20"	40.5 x 51
1RHE1716C-SR	17" x 16"	43 x 40.5
1RHE1717C-SR	17" x 17"	43 x 43
1RHE1718C-SR	17" x 18"	43 x 45.5
1RHE1816C-SR	18" x 16"	45.5 x 40.5
1RHE1817C-SR	18" x 17"	45.5 x 43
1RHE1818C-SR	18" x 18"	45.5 x 45.5
1RHE1820C-SR	18" x 20"	45.5 x 51
1RHE2017C-SR	20" x 17"	51 x 43
1RHE2018C-SR	20" x 18"	51 x 45.5
1RHE2020C-SR	20" x 20"	51 x 51
1RHE2218C-SR	22" x 18"	56 x 45.5
1RHE2220C-SR	22" x 20"	56 x 51
1RHE2222C-SR	22" x 22"	56 x 56
1RHE2418C-SR	24" x 18"	61 x 45.5
1RHE2420C-SR	24" x 20"	61 x 51


ハイブリッドエリート・ダブルバルブクッション

型番	サイズ (in.)	サイズ (cm)
2RHE1414C	14" x 14"	36 x 36
2RHE1415C	14" x 15"	36 x 38
2RHE1416C	14" x 16"	36 x 41
2RHE1515C	15" x 15"	38 x 38
2RHE1516C	15" x 16"	38 x 41
2RHE1517C	15" x 17"	38 x 43
2RHE1615C	16" x 15"	41 x 38
2RHE1616C	16" x 16"	41 x 41
2RHE1617C	16" x 17"	41 x 43
2RHE1618C	16" x 18"	41 x 46
2RHE1620C	16" x 20"	41 x 51
2RHE1716C	17" x 16"	43 x 41
2RHE1717C	17" x 17"	43 x 43
2RHE1718C	17" x 18"	43 x 46
2RHE1816C	18" x 16"	46 x 41
2RHE1817C	18" x 17"	46 x 43
2RHE1818C	18" x 18"	46 x 46
2RHE1820C	18" x 20"	46 x 51
2RHE2017C	20" x 17"	51 x 43
2RHE2018C	20" x 18"	51 x 46
2RHE2020C	20" x 20"	51 x 51

エアライトクッション

型番	サイズ (in.)	サイズ (cm)
AL1313HD	13" x 13"	33 x 33
AL1315HD	13" x 15"	33 x 38
AL1414HD	14" x 14"	36 x 36
AL1416HD	14" x 16"	36 x 41
AL1515HD	15" x 15"	38 x 38
AL1517HD	15" x 17"	38 x 43
AL1616HD	16" x 16"	41 x 41
AL1618HD	16" x 18"	41 x 46
AL1717HD	17" x 17"	43 x 43
AL1718HD	17" x 18"	43 x 46
AL1720HD	17" x 20"	43 x 51
AL1816HD	18" x 16"	46 x 41
AL1818HD	18" x 18"	46 x 46
AL1820HD	18" x 20"	46 x 51
AL1917HD	19" x 17"	48 x 43
AL1919HD	19" x 19"	48 x 48
AL2017HD	20" x 17"	51 x 43
AL2018HD	20" x 18"	51 x 46

製品比較表

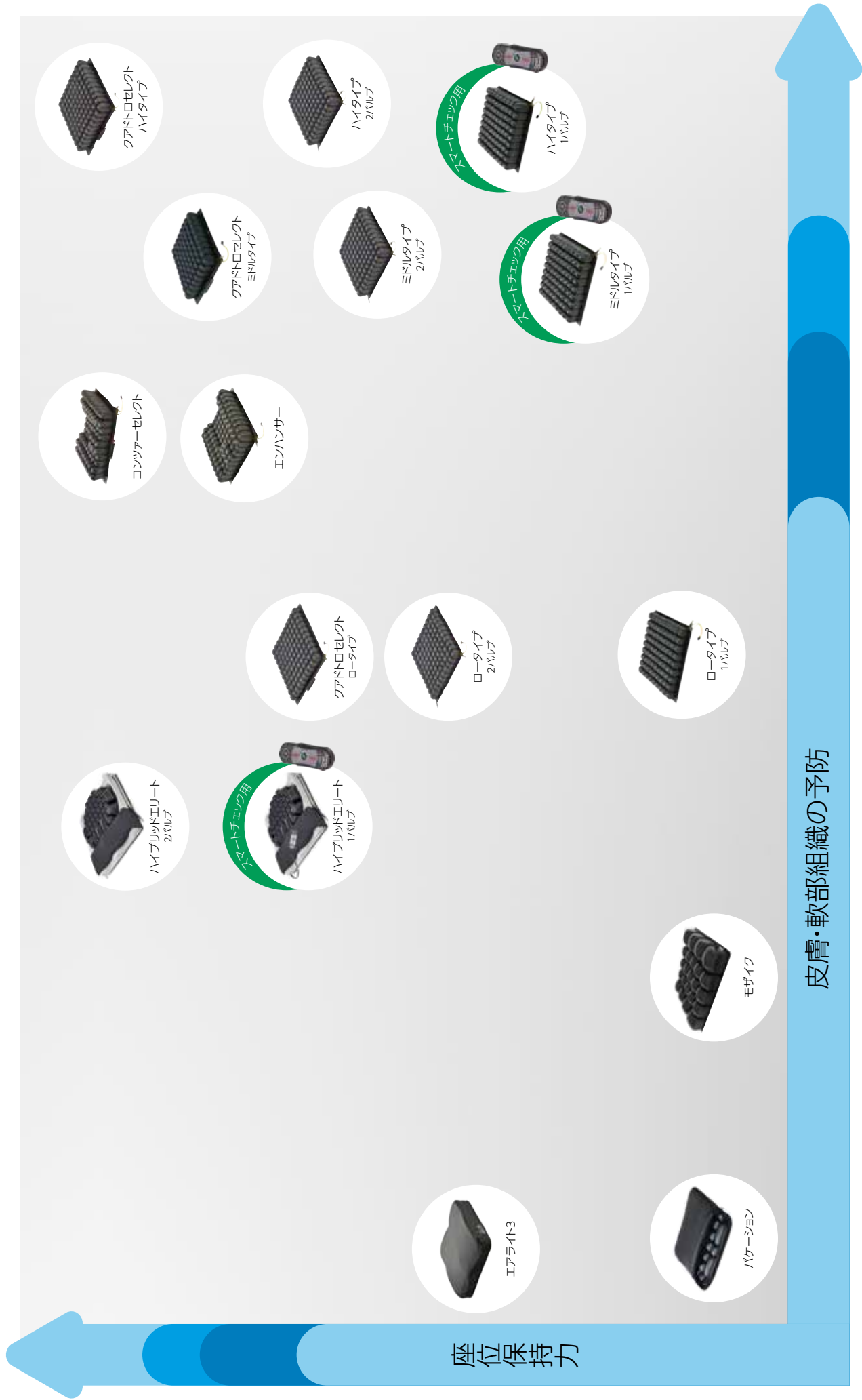

座位保持力

皮膚・軟部組織の予防

ご使用とお手入れ

口ホ製品は使いやすく、お手入れも簡単です。

ほとんどの口ホ製品には手動ポンプと取扱説明書が付属しています。取扱説明書にはセットアップ、取り扱い上の注意、洗浄方法のほか、カスタマーサポートや製品保証について記載されています。

洗浄と消毒

洗浄と消毒は別のプロセスです。消毒の前に洗浄してください。

別の方が使用される場合は、本製品を洗浄・消毒し、適切に機能していることをご確認ください。

カバー、ウレタンベース、背もたれを洗浄・消毒する場合は、それぞれの製品の取扱説明書をご確認ください。

クッションを洗浄する:カバーを外してバルブを閉じ、大きめのシンクに入れます。中性液体洗剤、台所用洗剤、洗濯用洗剤または多目的洗剤で手洗います。(製品のラベルの説明に従ってください。)柔らかいプラスチック製のブラシ、スポンジまたは布でクッションの表面をやさしくこすって洗います。きれいな水ですすぎ、自然乾燥させます。直射日光を避けてください。

クッションを消毒する:家庭用の漂白剤と水を1:9の割合に希釈し、洗浄の手順で洗います。漂白剤希釈液で製品を10分間浸け置きします。きれいな水で十分にすすぎ、自然乾燥させます。

備考:メーカー推奨濃度で使用すれば、消毒剤のほとんどは安全です。

口ホ製品の洗浄・消毒の詳細は、各製品の取扱説明書をご確認ください。

廃棄・リサイクル

廃棄:本書に記載されている製品は、適切に使用し、地域の規制に従って廃棄した場合、その構成部品が既知の環境危険因子に関連することはありません。

焼却する場合は、認可を受けた正規の廃棄物管理施設で処理してください。

リサイクル:本製品のリサイクル方法については自治体にお問い合わせください。リサイクルの詳細については、当社にお問い合わせください。

返品

返品に伴い、費用が発生する場合があります。返品される場合は、事前に購入元までご連絡ください。

保証に関する情報

口ホ製品の保証についてご不明な点は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

米国以外では、現地のペルモビール販売店にお問い合わせください。

最新の口ホ販売店の一覧は当社ウェブサイト permobilkk.jp でご確認くださいか、お電話でお問い合わせください。メールの場合は Info.jp@permobil.com までお送りください。

製品保証が適用されない製品に対して修理やサービスを実施する場合、必要な費用を申し受けることがあります。

備考:アダプター以外のすべての製品にポンプと修理キットが付属しています。すべての口ホ製品には取扱説明書が付属しています。

備考:以下の製品を除くすべての口ホクッションと口ホバックサポートにはカバーが付属しています。シャワー・トイレクッション、トイレシート、アダプター、ヒールパッド、ランバーサポート

品質管理

ペルモビールのグループ企業である口ホはFDAモデルを上回る品質管理体制を整備しています。また、口ホの品質管理システムは10年以上前から2つのISO規格認証を受けています。口ホの品質管理システムはISO13485:2016の認証を受けています。

©2020 PERMOBIL

ペルモビールは製品を継続的に改良する方針を定めており、合わせて本書は改訂される場合があります。本書の最新版はPermobilkk.jpでご確認ください。

以下は、ペルモビール、ROHOの商標および登録商標です。

ADAPTOR®, AGILITY®, AGILITY CARBON™, AIR FLOATATION™, AirLITE®, CONTOUR SELECT®, DRY FLOATATION®, Yellow Rope®, ENHANCER®, Hybrid Elite®, Hybrid Elite SR™, ISOFLO Memory Control®, LOW PROFILE®, MID PROFILE™, MINI-MAX®, MOSAIC®, nexus SPIRIT®, QUADTRO SELECT®, ROHO®, Shape Fitting Technology®, Sensor Ready™, Smart Check®.

Therafin® はTherafin Corporationの登録商標です。Ultra Leather™はUltra Fabricsの登録商標です。Inc.Zytel® はDuPontの登録商標です。

正規ロホ製品:ロホのロゴマーク、イエローロープと、カバー内部に収められている当社独自の黒いエアセルが、正規のロホ製品の証です。

□ホクツション
- 価格表 -

型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)
□ホ 1 バルブクッション			
1R66C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 6X6 セル カバー付き	¥69,700	¥76,670
1R67C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 6X7 セル カバー付き		
1R77C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 7X7 セル カバー付き		
1R78C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 7X8 セル カバー付き		
1R79C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 7X9 セル カバー付き		
1R87C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 8X7 セル カバー付き		
1R88C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 8X8 セル カバー付き		
1R89C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 8X9 セル カバー付き		
1R810C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 8X10 セル カバー付き		
1R811C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 8X11 セル カバー付き		
1R98C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 9X8 セル カバー付き		
1R99C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 9X9 セル カバー付き		
1R910C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 9X10 セル カバー付き		
1R911C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 9X11 セル カバー付き		
1R912C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 9X12 セル カバー付き		
1R108C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 10X8 セル カバー付き		
1R109C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 10X9 セル カバー付き		
1R1010C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 10X10 セル カバー付き		
1R1011C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 10X11 セル カバー付き		
1R1012C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 10X12 セル カバー付き		
1R1013C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 10X13 セル カバー付き		
1R1014C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 10X14 セル カバー付き		
1R118C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 11X8 セル カバー付き		
1R119C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 11X9 セル カバー付き		
1R1110C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 11X10 セル カバー付き		
1R1111C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 11X11 セル カバー付き		
1R1112C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 11X12 セル カバー付き		
1R1113C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 11X13 セル カバー付き		
1R1114C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 11X14 セル カバー付き		
1R128C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 12X8 セル カバー付き		
1R129C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 12X9 セル カバー付き		
1R1210C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 12X10 セル カバー付き		
1R1211C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 12X11 セル カバー付き		
1R1212C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 12X12 セル カバー付き		
1R1213C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 12X13 セル カバー付き		
1R1214C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 12X14 セル カバー付き		
1R138C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 13X8 セル カバー付き		
1R139C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 13X9 セル カバー付き		
1R1310C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 13X10 セル カバー付き		
1R1311C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 13X11 セル カバー付き		
1R1312C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 13X12 セル カバー付き		
1R1313C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 13X13 セル カバー付き		
1R1314C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 13X14 セル カバー付き		
1R1410C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 14X10 セル カバー付き		
1R1411C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 14X11 セル カバー付き		
1R1412C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 14X12 セル カバー付き		
1R1413C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 14X13 セル カバー付き		
1R1414C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 14X14 セル カバー付き		
型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)

型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)
1R148C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 14X8 セル カバー付き	¥69,700	¥76,670
1R149C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 14X9 セル カバー付き		
1R1511C	□ホ・1バルブ ハイタイプ 15X11 セル カバー付き		
1R77MPC	□ホ・1バルブ ミドルタイプ 7X7 セル カバー付き		
1R78MPC	□ホ・1バルブ ミドルタイプ 7X8 セル カバー付き		
1R88MPC	□ホ・1バルブ ミドルタイプ 8X8 セル カバー付き		
1R89MPC	□ホ・1バルブ ミドルタイプ 8X9 セル カバー付き		
1R910MPC	□ホ・1バルブ ミドルタイプ 9X10 セル カバー付き		
1R99MPC	□ホ・1バルブ ミドルタイプ 9X9 セル カバー付き		
1R109MPC	□ホ・1バルブ ミドルタイプ 10X9 セル カバー付き		
1R1010MPC	□ホ・1バルブ ミドルタイプ 10X10 セル カバー付き		
1R1011MPC	□ホ・1バルブ ミドルタイプ 10X11 セル カバー付き		
1R1110MPC	□ホ・1バルブ ミドルタイプ 11X10 セル カバー付き		
1R1111MPC	□ホ・1バルブ ミドルタイプ 11X11 セル カバー付き		
1R66LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 6X6 セル ローカバー付き		
1R67LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 6X7 セル ローカバー付き		
1R77LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 7X7 セル ローカバー付き		
1R78LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 7X8 セル カバー付き		
1R79LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 7X9 セル カバー付き		
1R87LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 8X7 セル カバー付き		
1R88LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 8X8 セル カバー付き		
1R89LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 8X9 セル カバー付き		
1R810LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 8X10 セル カバー付き		
1R98LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 9X8 セル カバー付き		
1R99LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 9X9 セル カバー付き		
1R910LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 9X10 セル カバー付き		
1R911LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 9X11 セル カバー付き		
1R108LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 10X8 セル カバー付き		
1R109LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 10X9 セル カバー付き		
1R1010LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 10X10 セル カバー付き		
1R1011LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 10X11 セル カバー付き		
1R119LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 11X9 セル カバー付き		
1R1110LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 11X10 セル カバー付き		
1R1111LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 11X11 セル カバー付き		
1R1210LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 12X10 セル カバー付き		
1R1310LPC	□ホ・1バルブ ロータイプ 13X10 セル カバー付き		
□ホ・クアドトロセレクト			
QS66C	□ホ・クアドトロセレクト ハイタイプ 6X6 セル カバー付き	¥66,900	¥73,590
QS67C	□ホ・クアドトロセレクト ハイタイプ 6X7 セル カバー付き		
QS77C	□ホ・クアドトロセレクト ハイタイプ 7X7 セル カバー付き		
QS78C	□ホ・クアドトロセレクト ハイタイプ 7X8 セル カバー付き		
QS79C	□ホ・クアドトロセレクト ハイタイプ 7X9 セル カバー付き		
QS710C	□ホ・クアドトロセレクト ハイタイプ 7X10 セル カバー付き		
QS87C	□ホ・クアドトロセレクト ハイタイプ 8X7 セル カバー付き		
QS88C	□ホ・クアドトロセレクト ハイタイプ 8X8 セル カバー付き		
QS89C	□ホ・クアドトロセレクト ハイタイプ 8X9 セル カバー付き		
QS810C	□ホ・クアドトロセレクト ハイタイプ 8X10 セル カバー付き		
QS811C	□ホ・クアドトロセレクト ハイタイプ 8X11 セル カバー付き		
QS98C	□ホ・クアドトロセレクト ハイタイプ 9X8 セル カバー付き		
型番	商品名		

型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)
QS67LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 6X7 セルカバー付き	¥66,900	¥73,590
QS77LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 7X7 セル カバー付き		
QS78LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 7X8 セル カバー付き		
QS79LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 7X9 セル カバー付き		
QS87LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 8X7 セル カバー付き		
QS88LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 8X8 セル カバー付き		
QS89LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 8X9 セル カバー付き		
QS810LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 8X10 セル カバー付き		
QS98LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 9X8 セル カバー付き		
QS99LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 9X9 セル カバー付き		
QS910LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 9X10 セル カバー付き		
QS911LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 9X11 セル カバー付き		
QS108LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 10X8 セル カバー付き		
QS109LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 10X9 セル カバー付き		
QS1010LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 10X10 セル カバー付き		
QS1011LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 10X11 セル カバー付き		
QS119LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 11X9 セル カバー付き		
QS1110LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 11X10 セル カバー付き		
QS1111LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 11X11 セル カバー付き		
QS1210LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 12X10 セル カバー付き		
QS1211LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 12X11 セル カバー付き		
QS1212LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 12X12 セル カバー付き		
QS1310LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 13X10 セル カバー付き		
QS1311LPC	□ホ・クアドトロセレクト ロータイプ 13X11 セル カバー付き		
□ホ・コンツァーセレクト			
CS78C	□ホ・コンツァーセレクト 7X8 セル カバー付き	¥65,900	¥72,490
CS88C	□ホ・コンツァーセレクト 8X8 セル カバー付き		
CS89C	□ホ・コンツァーセレクト 8X9 セル カバー付き		
CS810C	□ホ・コンツァーセレクト 8X10 セル カバー付き		
CS98C	□ホ・コンツァーセレクト 9X8 セル カバー付き		
CS99C	□ホ・コンツァーセレクト 9X9 セル カバー付き		
CS910C	□ホ・コンツァーセレクト 9X10 セル カバー付き		
CS911C	□ホ・コンツァーセレクト 9X11 セル カバー付き		
CS109C	□ホ・コンツァーセレクト 10X9 セル カバー付き		
CS1010C	□ホ・コンツァーセレクト 10X10 セル カバー付き		
CS1011C	□ホ・コンツァーセレクト 10X11 セル カバー付き		
CS119C	□ホ・コンツァーセレクト 11X9 セル カバー付き		
CS1110C	□ホ・コンツァーセレクト 11X10 セル カバー付き		
CS1111C	□ホ・コンツァーセレクト 11X11 セル カバー付き		
CS1210C	□ホ・コンツァーセレクト 12X10 セル カバー付き		
CS1211C	□ホ・コンツァーセレクト 12X11 セル カバー付き		
CS1212C	□ホ・コンツァーセレクト 12X12 セル カバー付き		
CS1310C	□ホ・コンツァーセレクト 13X10 セル カバー付き		
CS1311C	□ホ・コンツァーセレクト 13X11 セル カバー付き		
□ホ・1バルブクッション (スマートチェック用)			
SMARTCHECK-01	□ホ・スマートチェック	¥20,010	¥22,011
1R66H-CA-SR	□ホ・1バルブ スマートチェック対応 ハイタイプ 6X6 セル カバー付き	¥68,700	¥75,570
1R67H-CA-SR	□ホ・1バルブ スマートチェック対応 ハイタイプ 6X7 セル カバー付き		
1R77H-CA-SR	□ホ・1バルブ スマートチェック対応 ハイタイプ 7X7 セル カバー付き		
型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)

型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)
2RHE1818C	□ホ・ハイブリッドエリート 2バルブ 18X18 インチ カバー付き	¥66,900	¥73,590
2RHE1820C	□ホ・ハイブリッドエリート 2バルブ 18X20 インチ カバー付き		
2RHE2017C	□ホ・ハイブリッドエリート 2バルブ 20X17 インチ カバー付き		
2RHE2018C	□ホ・ハイブリッドエリート 2バルブ 20X18 インチ カバー付き		
2RHE2020C	□ホ・ハイブリッドエリート 2バルブ 20X20 インチ カバー付き		
2RHE2218C	□ホ・ハイブリッドエリート 2バルブ 22X18 インチ カバー付き		
2RHE2220C	□ホ・ハイブリッドエリート 2バルブ 22X20 インチ カバー付き		
2RHE2222C	□ホ・ハイブリッドエリート 2バルブ 22X22 インチ カバー付き		
2RHE2418C	□ホ・ハイブリッドエリート 2バルブ 24X18 インチ カバー付き		
2RHE2420C	□ホ・ハイブリッドエリート 2バルブ 24X20 インチ カバー付き		
□ホ・エンハンサー			
ENH88C	□ホ・エンハンサー 8X8 セル カバー付き	¥68,700	¥75,570
ENH89C	□ホ・エンハンサー 8X9 セル カバー付き		
ENH98C	□ホ・エンハンサー 9X8 セル カバー付き		
ENH99C	□ホ・エンハンサー 9X9 セル カバー付き		
ENH910C	□ホ・エンハンサー 9X10 セル カバー付き		
ENH109C	□ホ・エンハンサー 10X9 セル カバー付き		
ENH1010C	□ホ・エンハンサー 10X10 セル カバー付き		
ENH1011C	□ホ・エンハンサー 10X11 セル カバー付き		
ENH1110C	□ホ・エンハンサー 11X10 セル カバー付き		
□ホ・2バルブクッション			
2R88C	□ホ・2バルブ ハイタイプ 8X8 セル カバー付き	¥68,700	¥75,570
2R89C	□ホ・2バルブ ハイタイプ 8X9 セル カバー付き		
2R98C	□ホ・2バルブ ハイタイプ 9X8 セル カバー付き		
2R99C	□ホ・2バルブ ハイタイプ 9X9 セル カバー付き		
2R910C	□ホ・2バルブ ハイタイプ 9X10 セル カバー付き		
2R911C	□ホ・2バルブ ハイタイプ 9X11 セル カバー付き		
2R109C	□ホ・2バルブ ハイタイプ 10X9 セル カバー付き		
2R1010C	□ホ・2バルブ ハイタイプ 10X10 セル カバー付き		
2R1011C	□ホ・2バルブ ハイタイプ 10X11 セル カバー付き		
2R1012C	□ホ・2バルブ ハイタイプ 10X12 セル カバー付き		
2R119C	□ホ・2バルブ ハイタイプ 11X9 セル カバー付き		
2R1110C	□ホ・2バルブ ハイタイプ 11X10 セル カバー付き		
2R88LPC	□ホ・2バルブ ロータイプ 8X8 セル カバー付き		
2R89LPC	□ホ・2バルブ ロータイプ 8X9 セル カバー付き		
2R99LPC	□ホ・2バルブ ロータイプ 9X9 セル カバー付き		
2R910LPC	□ホ・2バルブ ロータイプ 9X10 セル カバー付き		
2R109LPC	□ホ・2バルブ ロータイプ 10X9 セル カバー付き		
2R1010LPC	□ホ・2バルブ ロータイプ 10X10 セル カバー付き		
2R1011LPC	□ホ・2バルブ ロータイプ 10X11 セル カバー付き		
2R119LPC	□ホ・2バルブ ロータイプ 11X9 セル カバー付き		
2R1110LPC	□ホ・2バルブ ロータイプ 11X10 セル カバー付き		
□ホ・エアライト			
AL1313HD	□ホ・エアライト 3 13X13 インチ ヘビーデューティカバー付き	¥31,780	¥34,958
AL1315HD	□ホ・エアライト 3 13X15 インチ ヘビーデューティカバー付き		
AL1414HD	□ホ・エアライト 3 14X14 インチ ヘビーデューティカバー付き		
AL1416HD	□ホ・エアライト 3 14X16 インチ ヘビーデューティカバー付き		
AL1515HD	□ホ・エアライト 3 15X15 インチ ヘビーデューティカバー付き		
AL1517HD	□ホ・エアライト 3 15X17 インチ ヘビーデューティカバー付き		
型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)

型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)
AL1616HD	ロホ・エアライト 3 16X16 インチ ヘビーデューティカバー付き	¥31,780	¥34,958
AL1618HD	ロホ・エアライト 3 16X18 インチ ヘビーデューティカバー付き		
AL1717HD	ロホ・エアライト 3 17X17 インチ ヘビーデューティカバー付き		
AL1718HD	ロホ・エアライト 3 17X18 インチ ヘビーデューティカバー付き		
AL1720HD	ロホ・エアライト 3 17X20 インチ ヘビーデューティカバー付き		
AL1816HD	ロホ・エアライト 3 18X16 インチ ヘビーデューティカバー付き		
AL1818HD	ロホ・エアライト 3 18X18 インチ ヘビーデューティカバー付き		
AL1820HD	ロホ・エアライト 3 18X20 インチ ヘビーデューティカバー付き		
AL1917HD	ロホ・エアライト 3 19X17 インチ ヘビーデューティカバー付き		
AL1919HD	ロホ・エアライト 3 19X19 インチ ヘビーデューティカバー付き		
AL2017HD	ロホ・エアライト 3 20X17 インチ ヘビーデューティカバー付き		
AL2018HD	ロホ・エアライト 3 20X18 インチ ヘビーデューティカバー付き		
ロホ・モザイククッション			
MOS1616CA	ロホ・モザイククッション 16X16 インチ カバー付き	¥15,070	¥16,577
MOS1618CA	ロホ・モザイククッション 16X18 インチ カバー付き		
MOS1717CA	ロホ・モザイククッション 17X17 インチ カバー付き		
MOS1816CA	ロホ・モザイククッション 18X16 インチ カバー付き		
MOS1818CA	ロホ・モザイククッション 18X18 インチ カバー付き		
MOS2018CA	ロホ・モザイククッション 20X18 インチ カバー付き		
MOS1616HD	ロホ・モザイククッション 16X16 インチ ヘビーデューティカバー付き	¥17,300	¥19,030
MOS1618HD	ロホ・モザイククッション 16X18 インチ ヘビーデューティカバー付き		
MOS1717HD	ロホ・モザイククッション 17X17 インチ ヘビーデューティカバー付き		
MOS1816HD	ロホ・モザイククッション 18X16 インチ ヘビーデューティカバー付き		
MOS1818HD	ロホ・モザイククッション 18X18 インチ ヘビーデューティカバー付き		
MOS2018HD	ロホ・モザイククッション 20X18 インチ ヘビーデューティカバー付き		
LTV シート クッション			
LTVBLK	LTV シート クッション ウルトラレザーカバー付き	¥21,190	¥23,309
LTVC	LTV シート クッション キルティングカバー付き	¥13,770	¥15,147
特殊機能製品			
SEATTOILET	ロホ・トイレシート	¥37,660	¥41,426
SEATCMD1010LP	ロホ・シャワートイレクッション 10X10 セル ロータイプ	¥55,550	¥61,105
SEATCMD88LP	ロホ・シャワートイレクッション 8X8 セル ロータイプ		
SEATCMD89LP	ロホ・シャワートイレクッション 8X9 セル ロータイプ		
SEATCMD910LP	ロホ・シャワートイレクッション 9X10 セル ロータイプ		
SEATCMD99LP	ロホ・シャワートイレクッション 9X9 セル ロータイプ		
ADAPTOR	ロホ・アダプター 7X10 セル		
PS14	ロホ・プライバシーシールド 対応幅 14/15	¥6,360	¥6,996
PS16	ロホ・プライバシーシールド 対応幅 16/17		
PS18	ロホ・プライバシーシールド 対応幅 18/19		
PS20	ロホ・プライバシーシールド 対応幅 20/21		
MINI1515C	ロホ・ミニマックス 15X15 インチ カバー付き	¥68,700	¥75,570
MINI1616C	ロホ・ミニマックス 16X16 インチ カバー付き		
MINI1816C	ロホ・ミニマックス 18X16 インチ カバー付き		
MINI1818C	ロホ・ミニマックス 18X18 インチ カバー付き		
MINI2018C	ロホ・ミニマックス 20X18 インチ カバー付き		
MINI2020C	ロホ・ミニマックス 20X20 インチ カバー付き		
COV-1515MINI	カバー ロホ・ミニマックス 15X15 インチ	¥9,420	¥10,362
COV-1616MINI	カバー ロホ・ミニマックス 16X16 インチ		
COV-1816MINI	カバー ロホ・ミニマックス 18X16 インチ		
型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)

型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)		
COV-1818MINI	カバー ロホ・ミニマックス 18X18 インチ	¥9,420	¥10,362		
COV-2018MINI	カバー ロホ・ミニマックス 20X18 インチ				
COV-2020MINI	カバー ロホ・ミニマックス 20X20 インチ				
RECLINERCUSTC	ロホ・リクライナー	¥154,300	¥169,730		
SI1212	ソリッドシートインサート 12X12 インチ	¥5,650	¥6,215		
SI1214	ソリッドシートインサート 12X14 インチ				
SI1414	ソリッドシートインサート 14X14 インチ				
SI1415	ソリッドシートインサート 14X15 インチ				
SI1416	ソリッドシートインサート 14X16 インチ				
SI1515	ソリッドシートインサート 15X15 インチ				
SI1516	ソリッドシートインサート 15X16 インチ				
SI1517	ソリッドシートインサート 15X17 インチ				
SI1616	ソリッドシートインサート 16X16 インチ				
SI1617	ソリッドシートインサート 16X17 インチ				
SI1618	ソリッドシートインサート 16X18 インチ				
SI1620	ソリッドシートインサート 16X20 インチ				
SI1717	ソリッドシートインサート 17X17 インチ				
SI1718	ソリッドシートインサート 17X18 インチ				
SI1818	ソリッドシートインサート 18X18 インチ				
SI1820	ソリッドシートインサート 18X20 インチ				
SI1822	ソリッドシートインサート 18X22 インチ				
SI1824	ソリッドシートインサート 18X24 インチ				
SI2020	ソリッドシートインサート 20X20 インチ				
SI2022	ソリッドシートインサート 20X22 インチ				
SI2024	ソリッドシートインサート 20X24 インチ				
SI2424	ソリッドシートインサート 24X24 インチ				
マットレス					
MATTSECT	ロホ・ドライブローテーションマットレス 18x10 セル 1 セクション	¥66,380	¥73,018		
MATTSECT1610	ロホ・ドライブローテーションマットレス 16x10 セル 1 セクション				
MATTSECT1710	ロホ・ドライブローテーションマットレス 17x10 セル 1 セクション				
カバー					
COV-A66	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 6X6 ハイ /ミドル兼用タイプ	¥9,420	¥10,362		
COV-A66LP	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 6X6 ロータイプ				
COV-A67	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 6X7 ハイ /ミドル兼用タイプ				
COV-A67LP	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 6X7 ロータイプ				
COV-A77	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 7X7 ハイ /ミドル兼用タイプ				
COV-A77LP	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 7X7 ロータイプ				
COV-A78	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 7X8 ハイ /ミドル兼用タイプ				
COV-A78LP	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 7X8 ロータイプ				
COV-A79	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 7X9 ハイ /ミドル兼用タイプ				
COV-A79LP	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 7X9 ロータイプ				
COV-A810	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 8X10 ハイ /ミドル兼用タイプ				
COV-A810LP	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 8X10 ロータイプ				
COV-A811	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 8X11 ハイ /ミドル兼用タイプ				
COV-A87	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 8X7 ハイ /ミドル兼用タイプ				
COV-A87LP	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 8X7 ロータイプ				
COV-A88	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 8X8 ハイ /ミドル兼用タイプ				
COV-A88LP	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 8X8 ロータイプ				
COV-A89	カバー ロホ・1バルブ /2バルブ 8X9 ハイ /ミドル兼用タイプ				
型番	商品名			希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)

型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)
COV-A89LP	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 8X9 ロータイプ	¥9,420	¥10,362
COV-A98	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 9X8 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A98LP	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 9X8 ロータイプ		
COV-A99	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 9X9 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A99LP	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 9X9 ロータイプ		
COV-A910	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 9X10 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A910LP	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 9X10 ロータイプ		
COV-A911	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 9X11 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A911LP	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 9X11 ロータイプ		
COV-A912	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 9X12 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A108	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 10X8 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A108LP	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 10X8 ロータイプ		
COV-A109	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 10X9 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A109LP	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 10X9 ロータイプ		
COV-A1010	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 10X10 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1010LP	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 10X10 ロータイプ		
COV-A1011	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 10X11 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1011LP	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 10X11 ロータイプ		
COV-A1012	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 10X12 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1013	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 10X13 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1014	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 10X14 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A119	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 11X9 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A119LP	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 11X9 ロータイプ		
COV-A1110	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 11X10 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1110LP	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 11X10 ロータイプ		
COV-A1111	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 11X11 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1111LP	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 11X11 ロータイプ		
COV-A1112	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 11X12 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1113	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 11X13 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1114	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 11X14 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A118	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 11X8 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A128	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 12X8 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A129	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 12X9 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1210	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 12X10 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1210LP	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 12X10 ロータイプ		
COV-A1211	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 12X11 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1212	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 12X12 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1213	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 12X13 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1214	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 12X14 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A138	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 13X8 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A139	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 13X9 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1310	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 13X10 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1310LP	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 13X10 ロータイプ		
COV-A1311	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 13X11 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1312	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 13X12 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1313	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 13X13 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A1314	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 13X14 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A148	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 14X8 ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-A149	カバー ロホ・1バルブ/2バルブ 14X9 ハイ/ミドル兼用タイプ		
型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)

型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)
COV-HD810LP	カバー ヘビーデューティ 8X10 セル ロータイプ	¥11,180	¥12,298
COV-HD811	カバー ヘビーデューティ 8X11 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD98	カバー ヘビーデューティ 9X8 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD98LP	カバー ヘビーデューティ 9X8 セル ロータイプ		
COV-HD99	カバー ヘビーデューティ 9X9 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD99LP	カバー ヘビーデューティ 9X9 セル ロータイプ		
COV-HD910	カバー ヘビーデューティ 9X10 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD910LP	カバー ヘビーデューティ 9X10 セル ロータイプ		
COV-HD911	カバー ヘビーデューティ 9X11 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD911LP	カバー ヘビーデューティ 9X11 セル ロータイプ		
COV-HD912	カバー ヘビーデューティ 9X12 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD108	カバー ヘビーデューティ 10X8 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD108LP	カバー ヘビーデューティ 10X8 セル ロータイプ		
COV-HD109	カバー ヘビーデューティ 10X9 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD109LP	カバー ヘビーデューティ 10X9 セル ロータイプ		
COV-HD1010LP	カバー ヘビーデューティ 10X10 セル ロータイプ		
COV-HD1011	カバー ヘビーデューティ 10X11 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD1011LP	カバー ヘビーデューティ 10X11 セル ロータイプ		
COV-HD1012	カバー ヘビーデューティ 10X12 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD1013	カバー ヘビーデューティ 10X13 セル ハイ/ミドルタイプ		
COV-HD1014	カバー ヘビーデューティ 10X14 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD118	カバー ヘビーデューティ 11X8 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD119	カバー ヘビーデューティ 11X9 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD119LP	カバー ヘビーデューティ 11X9 セル ロータイプ		
COV-HD1110	カバー ヘビーデューティ 11X10 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD1110LP	カバー ヘビーデューティ 11X10 セル ロータイプ		
COV-HD1111	カバー ヘビーデューティ 11X11 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD1111LP	カバー ヘビーデューティ 11X11 セル ロータイプ		
COV-HD1112	カバー ヘビーデューティ 11X12 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD1113	カバー ヘビーデューティ 11X13 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD1114	カバー ヘビーデューティ 11X14 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD128	カバー ヘビーデューティ 12X8 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD129	カバー ヘビーデューティ 12X9 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD1210	カバー ヘビーデューティ 12X10 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD1210LP	カバー ヘビーデューティ 12X10 セル ロータイプ		
COV-HD1211	カバー ヘビーデューティ 12X11 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD1211LP	カバー ヘビーデューティ 12X11 セル ロータイプ		
COV-HD1212	カバー ヘビーデューティ 12X12 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD1212LP	カバー ヘビーデューティ 12X12 セル ロータイプ		
COV-HD1213	カバー ヘビーデューティ 12X13 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD1214	カバー ヘビーデューティ 12X14 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD138	カバー ヘビーデューティ 13X8 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD139	カバー ヘビーデューティ 13X9 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD1310	カバー ヘビーデューティ 13X10 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD1310LP	カバー ヘビーデューティ 13X10 セル ロータイプ		
COV-HD1311	カバー ヘビーデューティ 13X11 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD1311LP	カバー ヘビーデューティ 13X11 セル ロータイプ		
COV-HD1312	カバー ヘビーデューティ 13X12 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
COV-HD1313	カバー ヘビーデューティ 13X13 セル ハイ/ミドル兼用タイプ		
型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)

型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)
COV-HD1314	カバー ヘビーデューティ 13X14 セル ハイ / ミドル兼用タイプ	¥11,180	¥12,298
COV-HD148	カバー ヘビーデューティ 14X8 セル ハイ / ミドル兼用タイプ		
COV-HD149	カバー ヘビーデューティ 14X9 セル ハイ / ミドル兼用タイプ		
COV-HD1410	カバー ヘビーデューティ 14X10 セル ハイ / ミドル兼用タイプ		
COV-HD1411	カバー ヘビーデューティ 14X11 セル ハイ / ミドル兼用タイプ		
COV-HD1412	カバー ヘビーデューティ 14X12 セル ハイ / ミドル兼用タイプ		
COV-HD1413	カバー ヘビーデューティ 14X13 セル ハイ / ミドル兼用タイプ		
COV-HD1414	カバー ヘビーデューティ 14X14 セル ハイ / ミドル兼用タイプ		
COV-HDAL1313	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 13X13 インチ	¥9,420	¥10,362
COV-HDAL1315	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 13X15 インチ		
COV-HDAL1414	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 14X14 インチ		
COV-HDAL1416	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 14X16 インチ		
COV-HDAL1515	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 15X15 インチ		
COV-HDAL1517	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 15X17 インチ		
COV-HDAL1616	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 16X16 インチ		
COV-HDAL1618	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 16X18 インチ		
COV-HDAL1717	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 17X17 インチ		
COV-HDAL1718	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 17X18 インチ		
COV-HDAL1720	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 17X20 インチ		
COV-HDAL1816	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 18X16 インチ		
COV-HDAL1818	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 18X18 インチ		
COV-HDAL1820	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 18X20 インチ		
COV-HDAL1917	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 19X17 インチ		
COV-HDAL1919	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 19X19 インチ		
COV-HDAL2017	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 20X17 インチ	¥14,950	¥16,445
COV-HDAL2018	カバー ヘビーデューティ ロホ・エアライト 20X18 インチ		
COV-H1416	カバー ロホ・ハーモニークッション 14X16 インチ		
COV-H1616	カバー ロホ・ハーモニークッション 16X16 インチ		
COV-H1618	カバー ロホ・ハーモニークッション 16X18 インチ		
COV-H1716	カバー ロホ・ハーモニークッション 17X16 インチ		
COV-H1718	カバー ロホ・ハーモニークッション 17X18 インチ		
COV-H1816	カバー ロホ・ハーモニークッション 18X16 インチ		
COV-H1818	カバー ロホ・ハーモニークッション 18X18 インチ	¥10,000	¥11,000
COV-H2018	カバー ロホ・ハーモニークッション 20X18 インチ		
COV-HE1414	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 14X14 インチ		
COV-HE1415	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 14X15 インチ		
COV-HE1416	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 14X16 インチ		
COV-HE1515	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 15X15 インチ		
COV-HE1516	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 15X16 インチ		
COV-HE1517	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 15X17 インチ		
COV-HE1615	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 16X15 インチ		
COV-HE1616	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 16X16 インチ		
COV-HE1617	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 16X17 インチ		
COV-HE1618	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 16X18 インチ		
COV-HE1620	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 16X20 インチ		
COV-HE1716	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 17X16 インチ		
COV-HE1717	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 17X17 インチ		
COV-HE1718	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 17X18 インチ		
COV-HE1720	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 17X20 インチ		
型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)

型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)
COV-HE1816	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 18X16 インチ	¥10,000	¥11,000
COV-HE1817	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 18X17 インチ		
COV-HE1818	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 18X18 インチ		
COV-HE1820	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 18X20 インチ		
COV-HE2017	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 20X17 インチ		
COV-HE2018	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 20X18 インチ		
COV-HE2020	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 20X20 インチ		
COV-HE2218	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 22X18 インチ		
COV-HE2220	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 22X20 インチ		
COV-HE2222	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 22X22 インチ		
COV-HE2418	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 24X18 インチ		
COV-HE2420	カバー ロホ・ハイブリッドエリート 24X20 インチ		
COV-LTV1816	カバー LTV シート クッション ファブリック 18X16 インチ		
COV-LTVLTHR1816	カバー LTV シート クッション レザー 18X16 インチ	¥12,590	¥13,849
COV-PKT	カバー ロホ・パッキット	¥9,420	¥10,362
COV-BMR4080	カバー ロホ・リユーズブルマットレスオーバーレイ 40X80 インチ	¥23,190	¥25,509
COV-BMR4280	カバー ロホ・リユーズブルマットレスオーバーレイ 42X80 インチ	¥25,540	¥28,094
COV-BMR4880	カバー ロホ・リユーズブルマットレスオーバーレイ 48X80 インチ	¥28,950	¥31,845
COV-BMR5480	カバー ロホ・リユーズブルマットレスオーバーレイ 54X80 インチ	¥30,130	¥33,143
COV-BMR6080	カバー ロホ・リユーズブルマットレスオーバーレイ 60X80 インチ	¥31,190	¥34,309
COV-MR2PCSTD-N	カバー ロホ・マットレスオーバーレイエンクロージャーカバー ドライブローテーション マットレス用	¥25,070	¥27,577
COV-MR2PCSTD-P	カバー ロホ・マットレスオーバーレイエンクロージャーカバー ソフレックス 2/プロディ ジー用		
COV-MR3680	カバー ロホ・リユーズブルマットレスオーバーレイ 36X80 インチ	¥20,720	¥22,792
COV-RECLINER	カバー ロホ・リクライナー	¥18,830	¥20,713
COV-HDRECLINER	カバー ヘビーデューティ ロホ・リクライナー	¥22,480	¥24,728
付属品・その他			
HP45	ポンプシングルアクション	¥820	¥902
HP20	ポンプダブルアクション	¥1,290	¥1,419
A5	リペアパッチキット	¥940	¥1,034
型番	商品名	希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税込)



permobil

ペルモビール株式会社

〒135-0004

東京都江東区森下2丁目7番地6号

Tel: 03-6659-9500 Fax: 03-6659-9507

※営業時間 10:00 ~ 18:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)



販売店

＼ 最新の情報やコンテンツは公式 SNS をチェック！ /



ペルモビール株式会社 2026年4月発行