


# バッテリー・ユニット、裏カバーの交換 (14-03-11)


以下の方法は、S/N 000356 ~ 002000 の製品が対象です。

実際の使用部品は写真と若干異なる可能性があります。


1. サイズ 5/64"、持ち手が T ハンドルのレンチで4個の黒い皿ネジを緩め、バッテリーの裏パックを取外します。 皿ネジの頭をしっかりと押さえてネジを緩めて下さい。押さえが甘いとネジ穴をつぶしてしまいます。

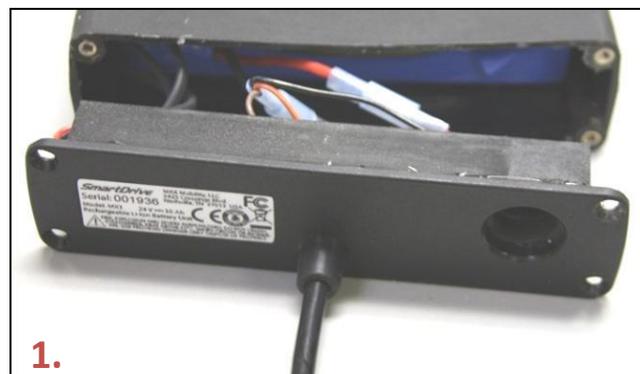

2. 2個のブルーのコネクタと1個の白のコネクタ(計3個)を裏カバーから外します。  
バッテリーパックの裏から出ている赤のワイヤ(Power 側)と黒いワイヤ(Ground 側)をショートさせないように注意して下さい(下図参照)。

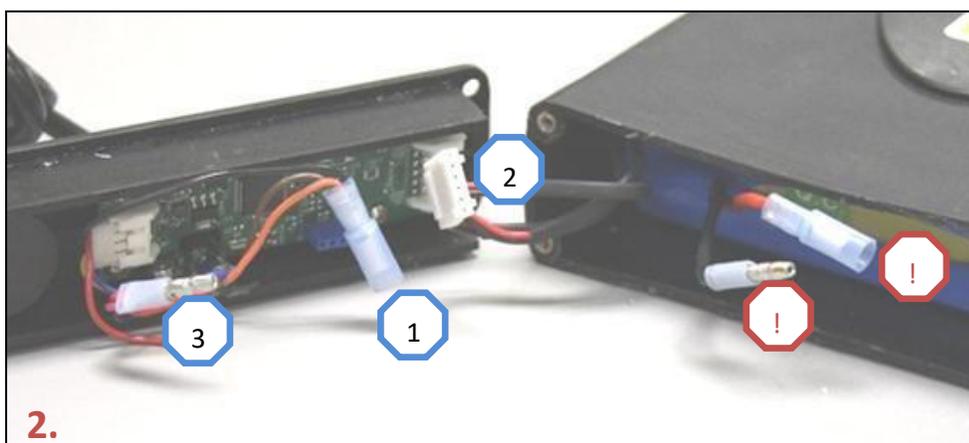

3. バッテリーパックからの2個のブルーのコネクタを新しいバッテリーパックのコネクタに接続し、白の6ピンのコネクタを回路基板の横に接続します(図3参照)。  
3個のコネクタがしっかり接続されている事を確認します(図3参照)。

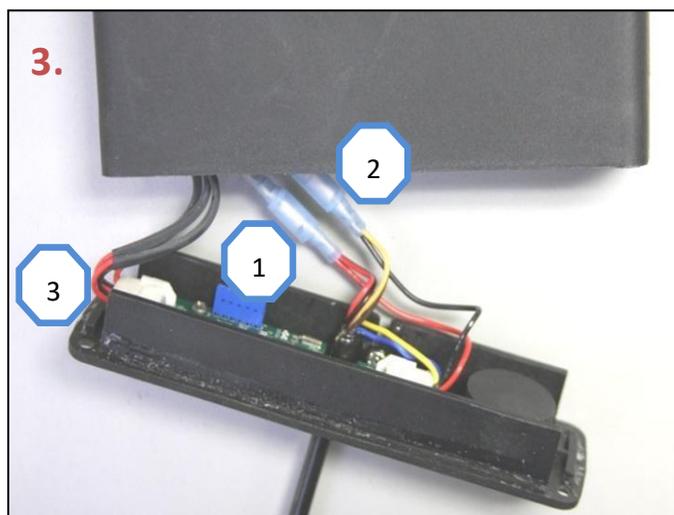

**↑ 対象製品の S/N 000356 ~002000**

実際の使用部品は写真と若干異なる可能性があります。

- カバーとバッテリーパック(筐体)の間にワイヤが挟まれていない事を確認し、バッテリーの裏カバーを交換します。付属のブルーのロックタイトを少量、4個の皿ネジに付け、バックカバーをバッテリーの筐体にネジを締め取付けます。

裏カバーのラベル用の凹みは左側になります。



- バッテリーユニットが正常に機能する事を確認します。
- 正常な機能する事が確認出来たら、古いバッテリーパックの S/N ステッカーを外し、新しいバッテリーパックの凹みに貼付けます。
- スマートドライブ・ユニットのシリアル番号を記録し、修理記録として控えておいて下さい。