

**permobil** | SEATING + POSITIONING

**THE ADAPTOR<sup>®</sup>** (アダプター) パッド・  
**ROHO<sup>®</sup> DRY FLOATATION<sup>®</sup>** (ロホドライフローテーション)  
特殊用途クッション

取扱説明書

製品：

THE ADAPTOR ° (アダプター) パッド

ROHO ° HEAL PAD ° (ヒールパッド) クッション

ROHO ° MINI-MAX ° (ミニマックス) クッション

ROHO ° PACK-IT ° (パックイット) クッション

ROHO ° Shower/Commode (シャワー・トイレ) クッション

ROHO ° Toilet Seat (便座クッション)

ROHO ° Recliner System (リクライナーシステム)

## ご注意ください

販売店各位：本書は、本製品のユーザーに必ず支給してください。

ユーザーご本人または介護をされる方へ：本製品を使用される前に本書をお読みください。また、以降必要な際に参照できるように説明書を大切に保管してください。

製品には ROHO<sup>®</sup> (ロホ)、DRY FLOATATION<sup>®</sup> (ドライフローテーション)、MINI-MAX<sup>®</sup> (ミニマックス)、PACK-IT<sup>®</sup> (パックイット)、HEAL PAD<sup>®</sup> (ヒールパッド)、THE ADAPTOR<sup>®</sup> (アダプター)、Yellow Rope<sup>®</sup> (イエローロープ) と shape fitting technology<sup>®</sup> (シェイプフィッティングテクノロジー) をはじめとする複数の特許および商標権の対象となるものがあります。Zytel<sup>®</sup> は DuPont の登録商標です。

製品情報は変更される場合があります。

© 2007, 2019 Permobil

2019/02/13 改訂

## もくじ

安全に関する重要事項	4-5
製品仕様	5
アダプター	6
ヒールパッド	6
ミニマックスとパックイット	7
シャワー・トイレクッションと便座クッション	8
リクライナーシステム	9
洗浄と消毒	10
お手入れの表示	11
トラブルシューティング	11
保管・廃棄・リサイクル	11
修理キットの使い方	14
製品限定保証	15-16

## 安全に関する表示



### 警告：

指定の手順に従わないと、大けがにつながる危険な状態になるおそれがある内容です。



### 注意：

指定の手順に従わないと、軽度から中程度のけがにつながる、または機器やその他の資産に損害をもたらす危険な状態になるおそれがある内容です。

## 連絡先

ペルモビール株式会社

〒135-0004

東京都江東区森下 2-7-6

Pkk.Support@permobil.com

電話 03-6659-9500

FAX 03-6659-9507

## 安全に関する重要事項



### 警告：

- 1日1回は、空気圧を確認してください。
- さまざまな原因により、皮膚・軟部組織が損傷する場合があります。1日1回は皮膚を確認してください。赤みやあざ、黒ずみ（正常な皮膚と比較して）がある場合は、表面または深層の組織が損傷しているおそれがあり、手当が必要です。皮膚・軟部組織が変色している場合は、直ちに使用を中止してください。使用中止から30分経過しても元に戻らない場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
- クッションとカバーは適合するサイズを選び、本書の指示に従って使用してください。サイズが合わないとクッションの効果が損なわれ、皮膚・軟部組織に対するリスクが高まります。また、不安定になり、車いすから転落するおそれがあります。
- 本書で指示がある場合を除き、このクッションを他の製品や器具の上に置いて使用しないでください。不安定になり、車いすから転落するおそれがあります。
- ご使用になる方とクッションの間に物をはさまないでください。本製品に適合したカバーのみをご使用ください。カバーの内外を問わず、ご使用になる方の下に物を入れるとクッションの効果が損なわれます。
- クッションの表面は、周囲の温度に応じて高温または低温になります。特にクッションが直接皮膚に触れる場合にはご注意ください。
- クッションを水中での救命具（ライフジャケット等）として使用しないでください。水中で体重を支える機能はありません。
- 皮膚が座面に触れる場合は、十分な注意が必要です。摩擦により、けがををするおそれがあります。
- 空気圧が不十分または過大な状態でクッションを使用しないでください。効果が損なわれるだけでなく、皮膚・軟部組織へのリスクが高まるおそれがあります。クッションから空気が漏れていると思われる場合、クッションに空気を注入できない、または抜くことができない場合は「トラブルシューティング」をご確認ください。解決しない場合は、直ちに医師、介護者、販売店またはカスタマーサポートにご連絡ください。
- クッションを取り扱う際は、角のハトメに指をはさまないようにご注意ください。
- カバーと部品の破損や故障は定期的に点検し、必要に応じて交換してください。
- 本製品を高热、火気、高温の灰に晒さないでください。他の製品や器具と組み合わせた場合、可燃性を含む本製品の試験結果や認定内容をそのまま適用することはできません。本製品と組み合わせて使用するすべての製品の試験結果や認定内容をご確認ください。
- 本書に示した作業をご自身で実行できない場合は、医師、機器の提供者、販売店またはカスタマーサポートにサポートをご依頼ください。



### 注意：

- クッションには鋭利な物を近づけないでください。
- クッションは、油性ローションまたはラノリンに触れないようにしてください。素材が破損する場合があります。
- 高度の変化により、ドライフローテーションクッションの調整が必要になる場合があります。
- オゾンに長期的に曝露すると素材が劣化して性能に影響を及ぼし、保証が無効になります。

## 安全に関する重要情報（つづき）



## 注意（つづき）：

- ドライブローテーションクッションの空気注入バルブを取っ手にしないでください。持ち運ぶ際は、クッションのペース部分またはカバーの取っ手を持ってください。
- ドライブローテーションクッションを0°以下の温度に設置し、通常より固くなった場合は、室温に戻るまでお待ちください。
- ご使用の製品に適合しないポンプ、カバーまたは修理キットを使用すると、製品の保証が無効になる場合があります。

ご使用になる方のニーズに沿った適切な製品は、本書に記載の用途のみを根拠とせず、専門の医師が選択してください。本製品の用途の記載のみに基づいて製品の選択をすべきではありません。

本書に記載されている製品の目的は、治療用の装置や、治療のための介入を含む総合的な介護計画または治療計画の一部です。介護計画または治療計画は、専門の医師がご使用になる方の身体的なニーズと病状を評価して立案してください。

製品を適切にご使用いただくため、視覚・読解・認知障害についても医師が評価し、介護者によるサポートや他の支援技術（大きく印刷した説明書など）の必要性を判断してください。

## 製品仕様

パッケージ内容：本書で説明する製品には、取扱説明書、製品登録カード、修理キットが付属しています。アダプターパッド以外のすべての製品に口ホ手動ポンプが付属しています。ミニマックスクッション、パックイットクッションとリクライナークッションにはカバーが付属しています。

交換用部品のご注文は、販売店またはカスタマーサポートまでご連絡ください。

寸法表	高さ・高さの範囲	幅・幅の範囲	奥行・奥行の範囲	平均重量 <sup>※</sup>
	cm	cm	cm	kg
アダプター	2	25	34	0.2
ヒールパッド	1.5-4	29.5	31.5	0.3
ミニマックス	3	38.5-52	37.5-51.5	1
パックイット	3	41.5	24	0.7
シャワー・トイレクッション	5.5	37.5-42	37.5-46.5	1
便座クッション	2.5-5.5	20	40	0.5
リクライナークッション	カスタマーサポートまでお問い合わせください。		※ミドルサイズクッションの場合	

クッションの耐用年数：5年

シリアル番号のラベルは、クッションの底面にあります。

素材：

クッション：ネオプレンゴム（ラテックス不使用）、Zytel バルブ：

一部のクッションの部品：イエローローブ、スナップボタン、フック、ループファスナー、フラップ（ヒールパッド）


カバー：標準カバー：上部は伸縮性があり、サイドには立体構造で編みこまれた生地（スぺーサーファブリック）を使用。高耐久性カバー：上部とサイドには伸縮性と耐水性。標準カバー・高耐久性カバー：ファスナーまたはスナップボタンあり、底面はすべり止め加工。素材と可燃性要件への適合性については、カバーのお手入れラベルをご確認ください。パックイットカバーでは、伸縮性のあるストラップと金属リング。



フックとループファスナーが付属している場合は、クッションを車いすにさらにしっかりと固定してください。

## アダプター

用途：THE ADAPTOR<sup>®</sup>（アダプター）パッドは、緩衝、衝撃吸収のほか、車いす、ヘッドレスト、フットレストなどの摩擦を軽減して皮膚・軟部組織を保護するネオプレン製空気充填式エアセルデザインのクッションです。重量制限はありません。臀部下に設置する支持具としては使用できません。

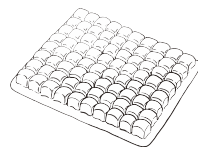

使用方法：使用する場所（車いす、トレー、ヘッドレスト、フットレストの側面など）に合わせ、なるべくエアセルの間をはさみで切ります。フックとループファスナーのストリップを使用して、必要な面に取り付けます。




警告：エアセルを切断すると、クッションとして機能しません。

## ヒールパッド

用途：ネオプレン製の The ROHO<sup>®</sup> HEAL PAD<sup>®</sup>（ヒールパッド）クッションは、かかとに装着し、皮膚・軟部組織を保護する空気充填式エアセルデザインのクッションです（調整可能）。重量制限はありません。

空気を注入する：


1. ヒールパッドを広げてエアセルを上向きにします。
2. 空気注入バルブを手動ポンプのノズルに差し込みます。空気注入バルブを1回転以上回して開きます。
3. ヒールパッドに空気を注入します。空気注入バルブを停止する位置まで回し、バルブを閉じます。手動ポンプを取り外します。空気注入バルブがしっかり閉じていることを確認します。

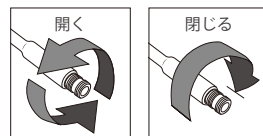


備考：空気注入バルブが開いているときは、自由に回転させることができます。

装着する：

1. スナップボタンを止めます。

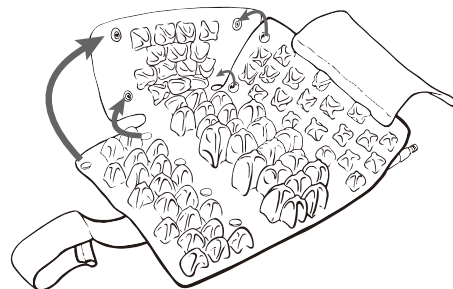

2. かかとをエアセルの上に載せます。

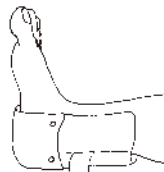


3. フラップをすねに被せ、ストラップを金属リングに通して調整します。




かかたがヒールパッドの基部についていないか、空気圧を確認してください。ついていない場合は、さらに空気を入れます。

## ミニマックスとパックイット

用途:ネオプレン製のThe ROHO<sup>®</sup> MINI-MAX<sup>®</sup> (ミニマックス) クッションは、座面の緩衝機能を高める空気充填式エアセルデザインのクッションです (調整可能)。重量制限はありませんが、ご使用になる方に合わせて適切なサイズをお求めください。

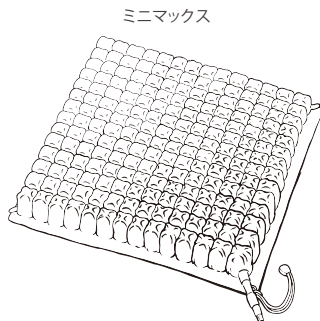


用途: The ROHO<sup>®</sup> PACK-IT<sup>®</sup> (パックイット) クッションは、短時間の緩衝機能を備えた、調整可能な空気充填式エアセルデザインのクッションです。重量制限はありませんが、ご使用になる方に合わせて適切なサイズをお求めください。

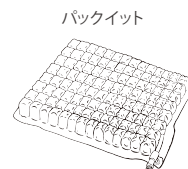



### ミニマックスとパックイットの空気圧調整：

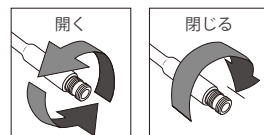1. 空気注入バルブを手動ポンプのノズルに差し込みます。空気注入バルブを1回転以上させて開き、すべてのセルが固くなるまで空気を注入します。
2. 手動ポンプを取り外します。空気注入バルブは閉じず、空気注入バルブから空気が抜けるようにしておきます。
3. 空気の音を聞いて (またはバルブに手をかざして)、空気が出てなくなったことを確認します。
4. 空気注入バルブを停止する位置まで回し、バルブを閉じます。空気注入バルブがしっかり閉じていることを確認します。
5. エアセルが上向きになっていることを確認し、クッションを取り付けます。



備考：空気注入バルブが開いているときは、自由に回転させることができます。

 身体がビールパッドの基部についていないか、空気圧を確認してください。ついてしまう場合は、さらに空気を入れます。

 フックとループファスナーを使用し、クッションをさらにしっかりと座席に固定することをおすすめします。フックファスナーは別売です。

カバーを取り外す：ファスナーを開き、クッションからカバーを外します。

ミニマックスのカバーを取り付ける：クッションをカバーに挿入します。角の開口部から空気注入バルブとイエローローブを引き出します。

パックイットのカバーを取り付ける：パッカーをカバーに挿入し、ファスナーを閉じます。

## シャワー・トイレクッションと便座クッション

用途：The ROHO<sup>®</sup> Shower/Commode（シャワー・トイレ）クッションは DRY FLOATATION<sup>®</sup>（ドライブローテーション）テクノロジーを使用した、空気充填式エアセルデザイン的支持具です（調整可能）。


室内用便器、ポータブル便器、シャワー用いすを対象とした短時間の緩衝機能を備え、皮膚・軟部組織を保護します。重量制限はありません。

シャワー・トイレクッション




用途：ネオプレン製 ROHO<sup>®</sup> Toilet Seat（便座）クッションは、トイレやポータブル便器に対応する、調整可能な空気充填式エアセルデザインのクッションです。重量制限はありません。

便座クッション

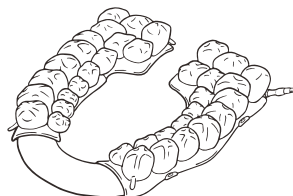

シャワー・トイレクッションと便座クッションの使用方法：

1. 空気注入バルブを手動ポンプのノズルに差し込みます。空気注入バルブを1回転以上回して開きます。クッションに空気を入れ、空気注入バルブが回らなくなるまで回してバルブを閉じます。手動ポンプを取り外します。空気注入バルブがしっかり閉じていることを確認します。すべての空気注入バルブで繰り返します。
2. エアセルが上向きであることを確認し、クッションを取り付けます。通常の着座位置で、クッションが正しく取り付けられていることを確認します。
3. 必要に応じて空気圧を調節します。調節できたら空気注入バルブを閉じます。

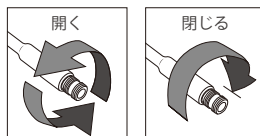

備考：空気注入バルブが開いているときは、自由に回転させることができます。

便座クッションを取り付ける：ストラップとスナップボタンでクッションを固定します。



便座クッションで覆われていない部分に皮膚が接触すると、けがをする場合があります。



空気圧を確認してください。空気圧の調整後、クッションの基部につかないことを確認してください。ついてしまう場合は、さらに空気を入れます。



## リクライナーシステム

用途：ROHO<sup>®</sup> Recliner（リクライナー）システムは、ご使用になる方の着座形状に合わせて局所的な皮膚・軟部組織を保護する DRY FLOATATION<sup>®</sup>（ドライブローテーション）テクノロジーを使用した、空気充填式エアセルデザインの体重支持具です（調整可能）。重量制限はありませんが、ご使用される方に合わせて適切なサイズをお選びください。

### 使用方法：

1. エアセルを上向きにしてリクライナーを車いすに載せませす。カバーの滑り止め加工面を車いすの座面と背もたれに向けませす。



フックとループファスナーを使用し、カバーをさらにしっかりと座席に固定することをおすすめませす。背もたれクッションのフックとループファスナーはカバーの内側とクッションの背面にありませす。

2. 空気注入バルブを手動ポンプのノズルに差し込みませす。空気注入バルブを少なくとも1回転させて開きませす。すべてのセルが固くなるまで空気を注入ませす。空気注入バルブを停止する位置まで回し、バルブを閉きませす。手動ポンプを取り外しませす。空気注入バルブがしっかりと閉じていることを確認ませす。すべての空気注入バルブで繰り返しませす。
3. 通常の位置に着座していることを確認ませす。リクライナーシステムが正しい位置に設置されていることを確認ませす。
4. クッションと臀部の間に手を入れ、坐骨結節（坐骨の隆起した部分）を確認ませす。手を入れたまま空気注入バルブを開き、処方通り空気を抜きませす。空気注入バルブを閉きませす。すべての空気注入バルブで繰り返しませす。

備考：空気注入バルブが開いているときは、自由に回転させることができます。




空気圧を確認してください。坐骨結節と座面の間に 1.5 cm 以上の空間があることを確認してください。空気圧は処方に従ってください。

リクライナークッションのカバーを取り外す：スナップボタンをはずし、クッションからカバーを外しませす。

リクライナークッションのカバーを取り付ける：

1. 背もたれクッションのカバーのファスナーを閉じてください。座面クッションと背もたれクッション：カバーのすべり止め加工面を上にし、スナップボタンの開口部を手前にしませす。エアセルは下向きの状態です：それぞれのクッションについて、空気注入バルブからカバーに挿入しませす。角の開口部から空気注入バルブとイエローロープを引き出しませす。空気注入バルブは、座面クッションでは前に、背もたれクッションでは上に出る状態です。
2. 2つのクッションを、スナップボタンの開口部が向かい合うように取り付けませす。背もたれクッションを座面クッションに連結しませす：カバーの底同士をスナップボタンで留めませす。クッションを表に返し、エアセルを上向きにしませす。カバーの上面同士をスナップボタンで留めませす。クッションがカバーの中で平らになるようにしませす。

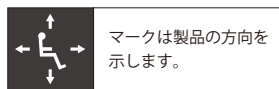

## 洗浄と消毒

以下の内容は、本書に掲載されているすべての製品でお守りください。



**警告：**

- 洗浄と消毒は別のプロセスです。消毒の前には洗浄が必要です。別の方が使用される場合は、本製品を洗浄・消毒し、適切に機能していることをご確認ください。
- 漂白剤の表示、消毒剤の安全上のご注意に従ってください。
- 殺菌について：高温は、劣化や損傷の原因となります。本書に掲載されている製品は、殺菌状態で梱包されたものではありません。また、使用前に殺菌・殺菌を必要とする製品でもありません。病院、施設等のプロトコルで殺菌が必要な場合：指示に従い洗浄と消毒を行います。次に、空気注入バルブを開き、なるべく低温（70℃以下）かつ短時間で殺菌します。オートクレーブは使用しないでください。

カバーのお手入れ：洗浄と消毒の前にカバーの底面からフックファスナーの部品を取り外してください。背もたれクッションのカバー：カバーを裏返し、ファスナーとスナップボタンを閉じます。同系色のものと一緒に洗濯してください。

カバーを洗浄する：クッションからカバーを外します。中性洗剤と冷水（30℃）で洗濯機のソフトコースで選択するか中性洗剤とぬるま湯で拭き取ります。乾燥機を低温に設定して乾かします。



カバーを消毒する：家庭用の漂白剤と水（30℃）を1：9の割合に希釈して手洗います。

その後よくすすぎます。または、洗濯機に入れ、温水（60℃）で洗濯します。乾燥機は低温に設定して乾かします。



または

**!** クッションをお手入れする際の注意：クッションの中に水や洗剤類が入らないようにしてください。洗濯機または乾燥機は使用しないでください。殺菌処理しないでください。研磨材（スチールウール、研磨パッド）、食洗器用苛性洗剤、石油系溶液または有機溶剤（アセトン、トルエン、メチルエチルケトン：MEK、ナフサ、ドライクリーニング液、シールはがし液など）を含む洗剤、油性ローション、ラノリン、フェノール系消毒剤、オゾンガス、紫外線による洗浄はクッションの損傷の原因となります場合があります。

クッションを洗浄する：カバーを外し、空気注入バルブを閉じます。中性液体洗剤、台所用洗剤、洗濯用洗剤または多用途洗剤で手洗います。（製品のラベルの指示に従ってください）。柔らかいプラスチック製のブラシ、スポンジまたは布でクッションの表面をやさしくこすって洗います。きれいな水ですすぎ、自然乾燥させます。直射日光を避けてください。



**!** 注意：すすぎは十分にしてください。洗剤が残っていると、エアセル同士が貼りつく原因となることがあります。

クッションを消毒する：家庭用の漂白剤と水を1：9の割合に希釈し、洗浄の手順で洗います。

漂白剤の安全上のご注意に従ってください。10分間浸け置きし、きれいな水で十分にすすぎ、自然乾燥させます。直射日光を避けてください。



## お手入れの表示



冷水での手洗い、最高温度は表示のとおり



漂白（漂白剤 1：水 9）



洗濯機のスタンダードコース、温水、最高温度は表示のとおり



洗濯機のソフトコース、冷水、最高温度は表示のとおり



手洗い



陰干し



乾燥機は低温のみ

## トラブルシューティング

解決しない場合は、最寄りの販売店またはカスタマーサポートまでご連絡ください。

**空気が漏れている：** クッションに空気を注入します。空気注入バルブがしっかり閉じていることを確認します。クッションのバンクを探します。穴が小さい場合、または目視で確認できない場合は本製品に付属の修理キットの説明書に従ってください。空気注入バルブまたはホースが損傷している場合、あるいは穴や漏れの程度が大きい場合は、限定保証をご確認いただくか、カスタマーサポートまでご連絡ください。

**快適に座れない、または安定しない：** 空気圧を確認します（製品の説明を参照）。エアセルとカバーの表面が上向きで、裏返しになっていないことを確認します。クッションのサイズが車いすのサイズに合っていることを確認します。クッションに体がなじむまで、少なくとも1時間はかかります。

**クッションが滑る：** カバーのすべり止め加工面が上向きになっていないことを確認します。フック、ループファスナー、ストラップ、スナップボタンがしっかりと締まり、固定されていることを確認します。フックとループファスナーを使用し、クッションをさらにしっかりと座席に固定することをおすすめします。フックファスナーは別売です。

## 保管・廃棄・リサイクル

**保管：** 保管前に、洗浄と消毒を行います。空気注入バルブを開き、製品の空気を抜きます（部品はすべて取り外します）。製品を湿気、汚染、破損から守る容器に収納します。

**廃棄：** 本書に記載の製品は、適切に使用し、地域の規制に従って廃棄した場合、その構成部品が既知の環境危険因子に関連することはありません。焼却する場合は、認可を受けた正規の廃棄物管理施設で処理してください。

**リサイクル：** 本製品のリサイクル方法については自治体にご連絡ください。リサイクルの詳細については、カスタマーサポートにお問い合わせください。

## 限定保証

**限定保証期間：** この製品のお買い上げから 24 か月。本保証は、パンク、破れ、焼け焦げ、誤使用、不正使用には適用されません。また、取り外し可能なカバーにも適用されません。詳細は、本製品に付属の限定保証をご確認いただくか、カスタマーサポートにお問い合わせください。



# permobil | SEATING + POSITIONING

ペルモビール株式会社  
〒135-0004  
東京都江東区森下 2-7-6  
Pkk.Support@permobil.com  
電話 03-6659-9500  
FAX 03-6659-9507



**Intertek**


The products featured in this document were  
manufactured under a Quality Management System  
that is certified to ISO 13485:2016.



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany



## 修理キットの使い方

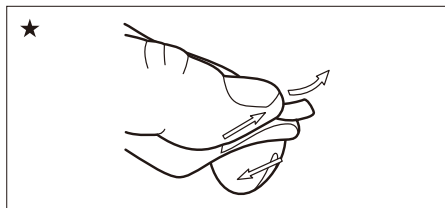

製品情報は変更される場合があります。

## 修理キットの内容：

- 2×2 cm 正方形シール 3 枚
- 消毒綿（イソプロパノール含有）3 枚

用意するもの：シンクまたは水を張った洗面器、クロス、油性マーカー、スプーン（またはスプーンと形状が近いもの）

## お問い合わせ

ペルモビール株式会社

〒135-0004

東京都江東区森下2-7-6

Pkk.Support@permobil.com

電話 03-6659-9500

FAX 03-6659-9507

## 空気漏れを確認する：

備考：QUADTRO SELECT®（クアドトロセレクト）および CONTOUR SELECT®（コンツアーセレクト）クッションについては ISOFLO Memory Control®（アイソフローバルブ）を開きます。

1. 製品空気を入れ、すべてのバルブを時計回りに回して閉じます。製品を水に浸け、気泡で空気漏れを確認したら水中から取り出します。

## 修理の準備をする：

2. 穴あき部分の水分をクロスで拭き取ります。穴の周りに油性マーカーで印をつけます。備考：マーカーのインクでシールの粘着力が低下することはありません。
3. 消毒綿で穴あき部分を拭き、乾いた清潔なクロスでアルコール分を拭き取ります。重要：穴の周りに水分、油脂、洗剤、石鹼が残らないようにします。自然乾燥させます。
4. すべての空気注入バルブを反時計回りに回し、空気を抜きます。シールを貼り付けやすくなるため、十分に空気を抜きます。

## シールを貼り付ける：

5. 親指と人差し指でシールの一端をつまみます（★イラスト参照）。もう一方の手で、シールを台紙からはがします。備考：シールの粘着面に触れると、粘着力が低下します。
6. 穴がシールの中央にくるように位置を調整しながら、シールが台紙から離れている部分を製品に貼り付けます。穴にシールを押しさえつながら、残りの台紙を少しずつはがします。推奨：シールは平らなところで貼り付けます。

## 空気を抜く

7. スプーンの背などを使って、中央から周囲に向かってシールを強く押し付けます。シールから光沢がなくなるまで、シールの下に入った空気を押し出します。
8. シールを貼り付けたら、5分間以上間隔を空けて空気を入れ、使用してください。

## ROHO® 製品限定保証



購入日：      年   月   日	製品名：
	シリアル番号：
販売店：	

# ROHO® 製品限定保証

**保証対象：**材料および製造上の欠陥

**保証期間：**製品によって異なります。詳細は製品に付属の取扱説明書をご確認ください。

保証期間の起算日は販売元から利用者へ販売した日付となります。

**保証対象外：**使用方法を誤った場合、事故や自然災害（洪水、竜巻、地震、火災など）による損傷、純正の付属品以外を使用された場合、または改造された場合。

**保証を受ける場合：**購入元にお問い合わせください。事前の承諾なくお送りいただいた製品は、返送いたします。

その場合、送料はお客様のご負担となります。

**免責事項と保証の制限：**商品の品質・機能に対する保証および商品が購入者の特定の目的と合致していることの保証その他取扱説明書等で明示された保証は、取扱説明書に記載された期間内に限り行います。また、保証の不履行に対する法的措置は、上記期間内に行うこととします。ペルモビールは、保証の不履行あるいはその他の結果による損害であるかに関わらず、偶発的または付随的損害について一切責任を負いません。

**返品条件：**新品未使用の場合に限り、事前にカスタマーサポートにお問い合わせください。返品手数料がかかる場合があります。

カスタマーサポート

ペルモビール株式会社

〒135-0004 東京都江東区森下2-7-6

Pkk.Support@permobil.com

電話 03-6659-9500 FAX 03-6659-9507