


販売店各位：本書は、本製品のユーザーに必ず支給してください。
ユーザーご本人または介護をされる方へ：本製品を使用される前に本書をお読みください。
また、以降必要な際に参照できるように説明書を大切に保管してください。

用途：ROHO® Contour Base（コンツアーベース）は、ロホクッションと合わせて使用し、ハンモック状の車いすの座面に特有なたわみに対応し、しっかりした着座をサポートする立体成型のベースです。重量制限はありませんが、ご使用になる方に合わせて適切なサイズをお求めください。



ご使用になる方のニーズに沿った適切な製品は、本書に記載の用途のみを根拠とせず、座位調整に詳しい医師が選択してください。

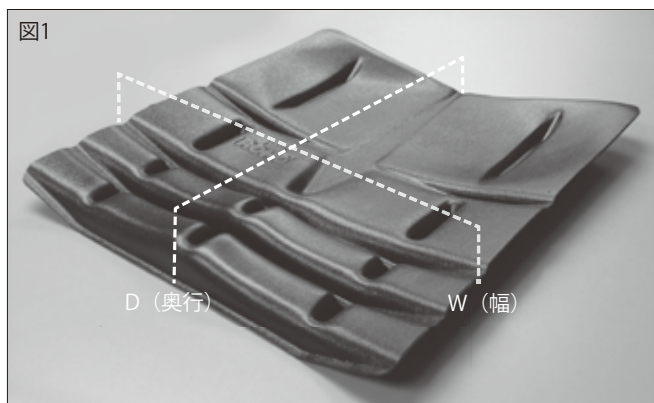




コンツアーベースの各部（図1参照）			
W = 幅	D = 奥行	F = 前端	R = 後端

寸法表の注釈（図2参照）	
*	コンツアーベースのサイズ
**	W × D = コンツアーベースの幅 × 奥行 コンツアーベースはクッションの下に敷き、カバーの中に入れます。エアセルを支えられる大きさのものを選んでください。 コンツアーベースの高さの範囲（サイズにより異なります） 2.5 ~ 3 cm
***	1R, 2R, ENH, QS, CS = クッションのモデル 77, 78, 87, 88, 89, 98, 99, 910, 109, 1010 = クッションのサイズ (例：910クッションの場合、セルは幅方向に9、奥行方向に10あります)
****	コンツアーベースのオーダーメイド品（BASEMTO）について、幅（W）と奥行（D）の範囲または種類を示しています。
本製品はすべてのロホクッションに適合するものではありません。 また、ご使用になれない国や地域もございます。詳しくは販売店または当社にお問い合わせください。	

図2																																
*	BASE1313	BASE1515	BASE1715	BASE1717																												
**	W × D 33.5 × 33 cm	W × D 38.5 × 38 cm	W × D 43 × 38.5 cm	W × D 43 × 44.5 cm																												
***	<table border="0"> <tr><td>1R</td><td rowspan="5">}</td><td rowspan="5">77</td></tr> <tr><td>2R</td></tr> <tr><td>ENH</td></tr> <tr><td>QS</td></tr> <tr><td>CS</td></tr> </table>	1R	}	77	2R	ENH	QS	CS	<table border="0"> <tr><td>1R</td><td rowspan="5">}</td><td rowspan="5">88</td></tr> <tr><td>2R</td></tr> <tr><td>ENH</td></tr> <tr><td>QS</td></tr> <tr><td>CS</td></tr> </table>	1R	}	88	2R	ENH	QS	CS	<table border="0"> <tr><td>1R</td><td rowspan="5">}</td><td rowspan="5">98</td></tr> <tr><td>2R</td></tr> <tr><td>ENH</td></tr> <tr><td>QS</td></tr> <tr><td>CS</td></tr> </table>	1R	}	98	2R	ENH	QS	CS	<table border="0"> <tr><td>1R</td><td rowspan="5">}</td><td rowspan="5">910</td></tr> <tr><td>2R</td></tr> <tr><td>ENH</td></tr> <tr><td>QS</td></tr> <tr><td>CS</td></tr> </table>	1R	}	910	2R	ENH	QS	CS
1R	}	77																														
2R																																
ENH																																
QS																																
CS																																
1R	}	88																														
2R																																
ENH																																
QS																																
CS																																
1R	}	98																														
2R																																
ENH																																
QS																																
CS																																
1R	}	910																														
2R																																
ENH																																
QS																																
CS																																
****	MOSAIC 1616	MOSAIC 1816	MOSAIC 1717	MOSAIC 1818																												
****	BASEMTO	幅：33 ~ 50.8 cm 奥行：33, 38, 44.5, 50.8 cm																														

洗浄方法：
 

消毒方法：
 + 


- 警告：**
- 本製品を高熱、火気、高温の灰に晒さないでください。他の製品や器具と組み合わせた場合、可燃性を含む本製品の試験結果や認定内容をそのまま適用することはできません。本製品と組み合わせて使用するすべての製品の試験結果や認定内容をご確認ください。
 - 部品の破損や故障は定期的に点検し、必要に応じて交換してください。

使用方法：コンツアーベースは、クッションの下にしてカバーに入れます。

保管：保管前に、洗浄と消毒を行います。

廃棄：本書に記載の製品は、適切に使用し、地域の規制に従って廃棄した場合、その構成部品が既知の環境危険因子に関連することはありません。焼却する場合は、認可を受けた正規の廃棄物管理施設で処理してください。


リサイクル：本製品のリサイクル方法については自治体にお問い合わせください。リサイクルの詳細については、当社にお問い合わせください。

本製品のお買い上げ日から起算した限定保証の期間：12か月。詳細は、本製品に付属の限定保証をご確認いただくか、カスタマーサポートにお問い合わせください。

ロホ製品には、ROHO®（ロホ）をはじめとする複数の特許および商標権の対象となるものがあります。
製品は継続的に改良し、合わせて本書の内容も改訂いたします。



修理キットの使い方

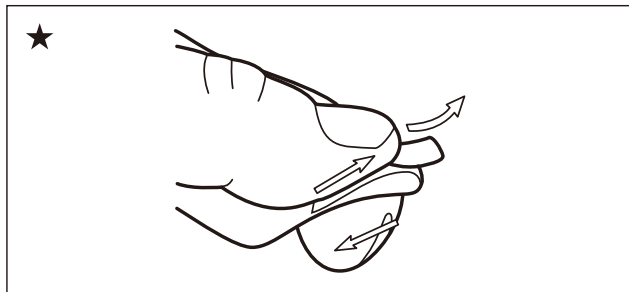

製品情報は変更される場合があります。

修理キットの内容：

- 2×2 cm 正方形シール 3 枚
- 消毒綿（イソプロパノール含有）3 枚

用意するもの：シンクまたは水を張った洗面器、クロス、油性マーカー、スプーン（またはスプーンと形状が近いもの）

お問い合わせ

ペルモビール株式会社

〒135-0004

東京都江東区森下2-7-6

Pkk.Support@permobil.com

電話 03-6659-9500

FAX 03-6659-9507

空気漏れを確認する：

備考：QUADTRO SELECT®（クアドトロセレクト）および CONTOUR SELECT®（コンツアーセレクト）クッションについては ISOFLO Memory Control®（アイソフローバルブ）を開きます。

1. 製品空気を入れ、すべてのバルブを時計回りに回して閉じます。製品を水に浸け、気泡で空気漏れを確認したら水中から取り出します。

修理の準備をする：

2. 穴あき部分の水分をクロスで拭き取ります。穴の周りに油性マーカーで印をつけます。備考：マーカーのインクでシールの粘着力が低下することはありません。
3. 消毒綿で穴あき部分を拭き、乾いた清潔なクロスでアルコール分を拭き取ります。重要：穴の周りに水分、油脂、洗剤、石鹼が残らないようにします。自然乾燥させます。
4. すべての空気注入バルブを反時計回りに回し、空気を抜きます。シールを貼り付けやすくするため、十分に空気を抜きます。

シールを貼り付ける：

5. 親指と人差し指でシールの一端をつまみます（★イラスト参照）。もう一方の手で、シールを台紙からはがします。備考：シールの粘着面に触れると、粘着力が低下します。
6. 穴がシールの中央にくるように位置を調整しながら、シールが台紙から離れている部分を製品に貼り付けます。穴にシールを押しえつけながら、残りの台紙を少しずつはがします。推奨：シールは平らなところで貼り付けます。

空気を抜く

7. スプーンの背などを使って、中央から周囲に向かってシールを強く押し付けます。シールから光沢がなくなるまで、シールの下に入った空気を押し出します。
8. シールを貼り付けたら、5 分間以上間隔をあげて空気を入れ、使用してください。

ROHO® 製品限定保証



購入日： 年 月 日	製品名： シリアル番号：
販売店：	

ROHO® 製品限定保証

保証対象：材料および製造上の欠陥

保証期間：製品によって異なります。詳細は製品に付属の取扱説明書をご確認ください。

保証期間の起算日は販売元から利用者へ販売した日付となります。

保証対象外：使用方法を誤った場合、事故や自然災害（洪水、竜巻、地震、火災など）による損傷、純正の付属品以外を使用された場合、または改造された場合。

保証を受ける場合：購入元にお問い合わせください。事前の承諾なくお送りいただいた製品は、返送いたします。

その場合、送料はお客様のご負担となります。

免責事項と保証の制限：商品の品質・機能に対する保証および商品が購入者の特定の目的と合致していることの保証その他取扱説明書等で明示された保証は、取扱説明書に記載された期間内に限り行います。また、保証の不履行に対する法的措置は、上記期間内に行うこととします。ペルモビールは、保証の不履行あるいはその他の結果による損害であるかに関わらず、偶発的または付随的損害について一切責任を負いません。

返品条件：新品未使用の場合に限り、事前にカスタマーサポートにお問い合わせください。返品手数料がかかる場合があります。

カスタマーサポート

ペルモビール株式会社

〒135-0004 東京都江東区森下2-7-6

Pkk.Support@permobil.com

電話 03-6659-9500 FAX 03-6659-9507