


ROHO® バケーションクッション
取扱説明書

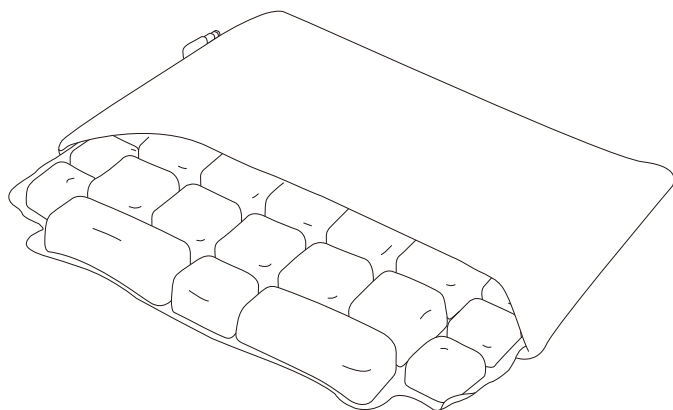


バケーションクッション取扱説明書

パッケージ内容：バケーションクッション、バケーションカバー、修理キット、手動ポンプ、取扱説明書、限定保証、製品登録カード

バケーションシートを調整する：

1. バルブを開きます。目視ですべてのセルに空気が入ったことが確認できるまで空気を注入します。空気注入バルブを閉じ、手動ポンプを取り外します。

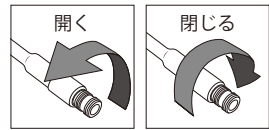

2. バケーションを座面に置きます。バケーションカバーのすべり止め加工面を下向きにし、カバーのファスナーのついた部分を後ろ側にします。空気注入バルブは左前になります。



3. 通常の着座位でバケーションシートに座ります。

4. 空気が抜けるようにバルブを開きます。空気が抜けるにつれ、ゆっくりとバケーションシートに沈んでいきます。

快適に座ることができる圧力になるまで空気を抜き、バルブを閉じます。快適な圧力になるまで空気を抜き、またはさらに注入して調整します。


バケーションカバーを洗淨する：

クッションからカバーを外します。

キルティングのカバー：冷水で、洗濯機のソフトコースで同色系のものと洗濯します。自然乾燥させます。

Ultraleather™（ウルトラレザー）のカバー：中性液体洗剤で手洗います。

水分を拭き取るか、自然乾燥させます。

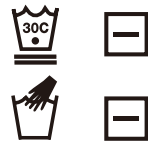

バケーションクッションを洗淨する：

1. バルブを閉じ、大きめのシンクに入れます。一般的な台所用洗剤、洗濯用洗剤または多用途洗剤を使い、製品の洗濯・洗淨ラベルの表示に従ってください。

2. 柔らかいプラスチック製ブラシ、スポンジ、または布で表面全体をやさしくこすります。

3. きれいな水でクッションをすすぎ、自然乾燥させるか、タオルなどで水分を拭き取ります。

- 直射日光を避けてください。

- 安全のため、食洗器用洗剤は使用しないでください（苛性が強いため）。

⚠ 警告：クッションを水中での救命具（ライフジャケット等）として使用しないでください。水中で体重を支える機能はありません。クッションには鋭利な物や高温の灰を近づけないでください。

本製品のお買い上げ日から起算した限定保証の期間：バケーションクッション：12か月。バケーションカバー：6か月。詳細は、本製品に付属の限定保証をご確認いただくか、カスタマーサポートにお問い合わせください。

製品には ROHO®（口ホ）、shape fitting technology® をはじめとする複数の特許および商標権の対象となるものがあります。Ultraleather™は Ultrafabrics の登録商標です。

製品情報は変更される場合があります。

© 2005, 2018 Permobil

permobil | SEATING + POSITIONING

ベルモビル株式会社

〒135-0004


東京都江東区森下2-7-6

Pkk.Support@permobil.com

電話 03-6659-9500

FAX 03-6659-9507

修理キットの使い方

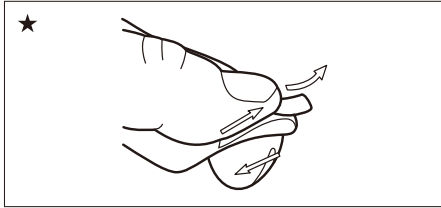

製品情報は変更される場合があります。

修理キットの内容：

- 2×2 cm 正方形シール 3 枚
- 消毒綿（イソプロパノール含有）3 枚

用意するもの：シンクまたは水を張った洗面器、クロス、油性マーカー、スプーン（またはスプーンと形状が近いもの）

お問い合わせ

ペルモビール株式会社
〒135-0004
東京都江東区森下2-7-6
Pkk.Support@permobil.com
電話 03-6659-9500
FAX 03-6659-9507

空気漏れを確認する：

備考：QUADTRO SELECT®（クアドトロセレクト）および CONTOUR SELECT®（コンツァーセレクト）クッションについては ISOFLO Memory Control®（アイソフローバルブ）を開きます。

1. 製品空気を入れ、すべてのバルブを時計回りに回して閉じます。製品を水に浸け、気泡で空気漏れを確認したら水中から取り出します。

修理の準備をする：

2. 穴あき部分の水分をクロスで拭き取ります。穴の周りに油性マーカーで印をつけます。備考：マーカーのインクでシールの粘着力が低下することはありません。
3. 消毒綿で穴あき部分を拭き、乾いた清潔なクロスでアルコール分を拭き取ります。重要：穴の周りに水分、油脂、洗剤、石鹼が残らないようにします。自然乾燥させます。
4. すべての空気注入バルブを反時計回りに回し、空気を抜きます。シールを貼り付けやすくなるため、十分に空気を抜きます。

シールを貼り付ける：

5. 親指と人差し指でシールの一端をつまみます（★イラスト参照）。もう一方の手で、シールを台紙からはがします。備考：シールの粘着面に触れると、粘着力が低下します。
6. 穴がシールの中央にくるように位置を調整しながら、シールが台紙から離れている部分を製品に貼り付けます。穴にシールを押しさえつながら、残りの台紙を少しずつはがします。推奨：シールは平らなところで貼り付けます。

空気を抜く

7. スプーンの背などを使って、中央から周囲に向かってシールを強く押し付けます。シールから光沢がなくなるまで、シールの下に入った空気を押し出します。
8. シールを貼り付けたら、5 分間以上間隔を空けて空気を入れ、使用してください。

ROHO® 製品限定保証



購入日： 年 月 日	製品名：
	シリアル番号：
販売店：	

ROHO® 製品限定保証

保証対象：材料および製造上の欠陥

保証期間：製品によって異なります。詳細は製品に付属の取扱説明書をご確認ください。

保証期間の起算日は販売元から利用者へ販売した日付となります。

保証対象外：使用方法を誤った場合、事故や自然災害（洪水、竜巻、地震、火災など）による損傷、純正の付属品以外を使用された場合、または改造された場合。

保証を受ける場合：購入元にお問い合わせください。事前の承諾なくお送りいただいた製品は、返送いたします。

その場合、送料はお客様のご負担となります。

免責事項と保証の制限：商品の品質・機能に対する保証および商品が購入者の特定の目的と合致していることの保証その他取扱説明書等で明示された保証は、取扱説明書に記載された期間内に限り行います。また、保証の不履行に対する法的措置は、上記期間内に行うこととします。ペルモビールは、保証の不履行あるいはその他の結果による損害であるかに関わらず、偶発的または付随的損害について一切責任を負いません。

返品条件：新品未使用の場合に限り、事前にカスタマーサポートにお問い合わせください。返品手数料がかかる場合があります。

カスタマーサポート
ペルモビール株式会社
〒135-0004 東京都江東区森下2-7-6
Pkk.Support@permobil.com
電話 03-6659-9500 FAX 03-6659-9507