

TT (サムスロットル) ボタン取付説明書

ご注意：図の表示はお持ちのスマートドライブと多少異なることがあります。

目的：

- ① 走行時にボタンに触れるとアシスト機能が停止しハンドリムをにぎることで停止できます。緊急停止が必要なときにもご利用いただけるので、手が届きやすいハンドリム付近へ取り付けてください。
- ② TTボタンを押し続けるとアシスト走行ができます。少しの距離を移動するさいに便利な機能です。

固定フレームへの取付け

二つのサムスロットル・ボタンは、車いすの両側のフレームに取り付けることができますので、ハンドリムから手を離すことなく簡単に押すことができます。


1. ボタンの裏張りゴムに設けられたスリットにベルクロを通し、車いす側面のパイプに巻き付けます。ベルクロの細幅の端を幅広の端にある細長い穴に通してきつく引張り、ベルクロを接着します。青色LEDが上を向き、各ボタンから出ているケーブルが車いすの後部に向かって這うように取り付けてください（図A）。

ご注意：車いすの座席クッションがネジ止めの場合は、ネジを緩めベルクロを金属棒の下に通し（それからネジを締める）、ボタンがハンドリムのより近くに位置するようにしてください。




図A

2. ボタンは、ケーブルを割くことで、ご希望の場所（座席後部が望ましい）まで引き離すことができます。余ったケーブルはクッションの下にしまい込みます。付属のベルクロを使い、ボタンのケーブルをクッションに固定します。ケーブルがはみ出して、車いすのスポークに巻き込まれないようにします（図B）。ケーブルの上にクッションを置き、ケーブルをよりしっかりと固定できるようにします。

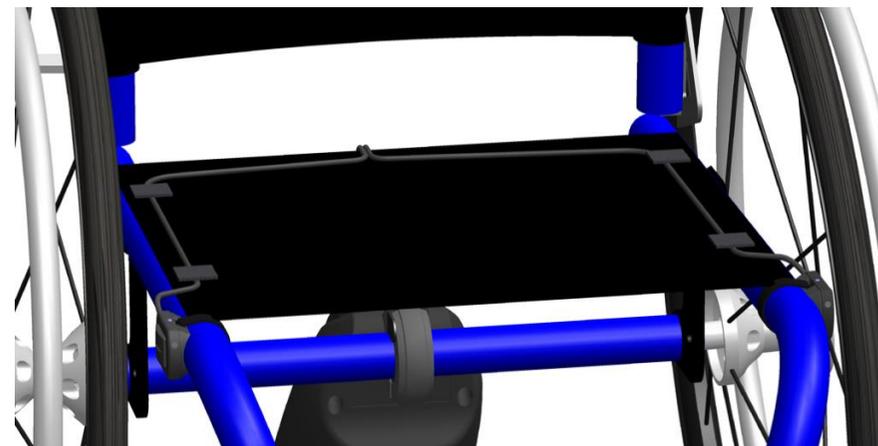

図B

3. コネクターをスマートドライブに接続しない場合、付属の金属ホルダーに磁石で固定することができます（図C）。金属ホルダーはクランプの前面と後面の間に置き、上のネジをホルダーの穴に通して取り付けます。ガタつきを防ぐために、先ず上のネジをしっかりと締めてから、次に下のネジを締めます。

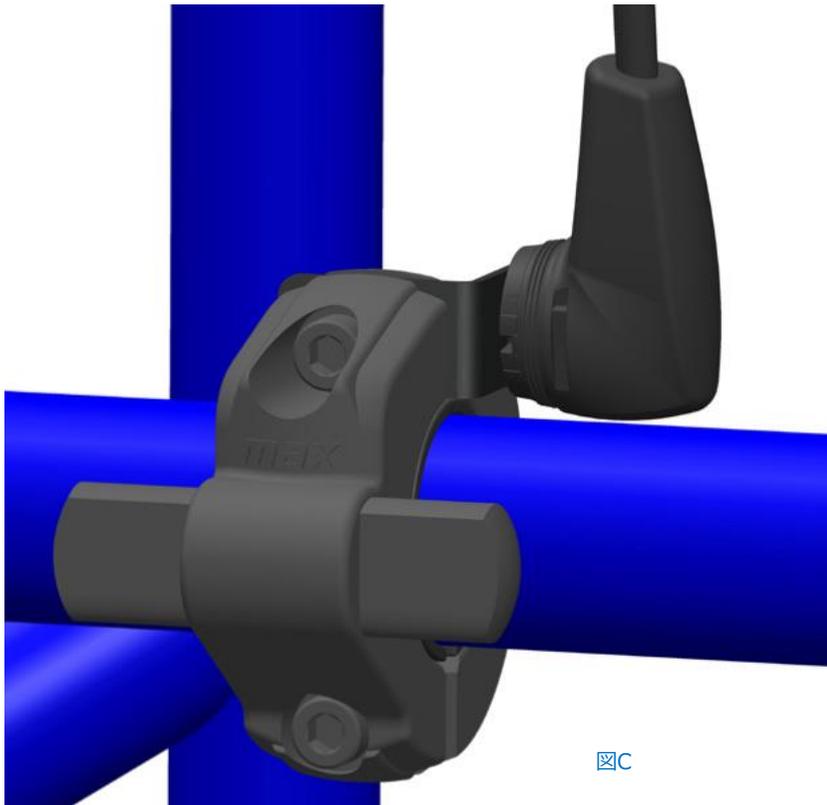

4. スマートドライブが正常に機能するためには、固定車用クランプ取付説明書に示されている位置と方向が極めて重要です。取付説明書を参考にして、必ず正しい方向に取り付けるよう注意してください。

折りたたみ式フレームへの取付け

二つのサムスロットル・ボタンは、車いすの両側のフレームに取り付けることができますので、ハンドリムから手を離すことなく簡単に押すことができます。

1. ボタンの裏張りゴムに設けられたスリットにベルクロを通し、車いす側面のパイプに巻き付けます。ベルクロの細幅の端を幅広の端にある細長い穴に通してきつく引張り、ベルクロの接着面に押し付けます。青色LEDが上を向き、各ボタンから出ているケーブルが車いすの後部に向かって這うように取り付けてください（図 D）。



2. ボタンは、ケーブルを割くことで、ご希望の場所（座席後部が望ましい）まで引き離すことができます。付属の結束バンドを使い、ケーブルをフレームのチューブに這わせて車いす後部の外に出します。ケーブルがはみ出して車いすのスポークに巻き込まれることがないようにします（図 E）。



3. 使用していないケーブルは背部から垂れ下がったままにできます。車いすを折りたたむ際に、ケーブルをたためるだけのたるみを持たせます。



ボタンは、ハンドリムから手を離さずに楽に押せるように、できるだけ車いすの車輪の近くに取り付けてください。

ボタンの操作/起動

- ・TTボタン中央ゴム部分を約1秒間押すことで作動します。わずかな力で操作が可能です。
- ・TTボタンは、押し続けることでアシストし続けるので短い距離の移動に便利です。操舵はハンドリムで行います。
- ・アシスト作動中にTTボタンを押すと、アシストが解除されます。
アシスト時は低速から0.6m/sの加速度で最高速度の 2.4 km/hまで緩やかに速度を上げます。ゆっくりした歩行速度と同じ速さです。
- ・押し続けているボタンを放せば、いつでもアシスト機能が停止します。アシスト作動中にボタンを押すと、最初にモーターが停止します。押し続けた場合、モーターは駆動を開始して、ゆっくりと速度を上げます。このボタンによる起動は、上り坂のように車いすを押すことが困難な場合に特に役立ちます。

・緊急時にはTTボタンを押し、ハンドリムを抑えて車いすを止めてください!!

- ・TTボタンは、ハンドリムから手を離さずにボタンが押せるよう、できるだけ車いすの車輪の近くに取り付けてください。
- ・アシストが待機状態であるときは、TTボタンを押し続けるか、プッシュトラッカーで指示をするとアシストが再起動するので、TTボタンやプッシュトラッカーは不意に当たらないように注意してください。

スマートドライブ本体、TTボタンやプッシュトラッカーの動作や感知に問題がある場合には、直ちにスマートドライブの使用を止めて、ご購入いただきました販売店に連絡してください。



使用に先立ち、操作方法に関する詳細指示は、スマートドライブの取扱説明書を参照してください。また、取扱説明書に記載されたすべての警告と注意事項に留意してください。