

鉛電池用充電器 HP0180WB 24V 4A, 6A 取扱説明書

◎はじめに

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に本書をお読みいただき、正しくご使用ください。

◎同梱品

- ・充電器本体
- ・電源コード

◎ご使用方法

- ・充電器本体に電源コードを挿入が止まるまで差し込んで下さい。
- ・電源コードのプラグをコンセントに挿入が止まるまで差し込んで下さい。
- ・LED表示が赤色になり充電待機状態になります。
- ・出力プラグを電池に挿入が止まるまで差し込んで下さい。 (車いすの充電口に差し込んで下さい。)
- ・LED表示が橙色になり充電が始まります。
- ・充電が完了するとLED表示が緑色になります。
- ・充電が完了したら電池から出力プラグを抜き、電源コードをコンセントから抜いてください。

◎LED表示

充電待機中	充電中	充電完了	電池及び充電異常
赤色	橙色	緑色	赤色点滅

※LED表示が赤色点滅状態になった場合は電源コードをコンセントから抜き充電器をリセットしてください。

◎使用上のご注意

- ・鉛電池専用充電器です。指定された24V鉛電池以外の充電には使用しないでください。
- ・屋内専用です。高温多湿での使用、また水に濡れた時は使用しないでください。
- ・据え置き型です。過度の振動、衝撃は与えないでください。
- ・出力プラグはショートさせないでください。
- ・電源、出力プラグは必ずプラグ本体を持って抜いてください。コードを引っ張って抜かないでください。
- ・使用中は充電器本体が発熱しますが異常ではありません。
- ・入力電圧範囲はAC100V～240Vです。海外でも地域に合った電源コードを使用すれば充電可能です。但し、電力事情の悪い地域での使用は避けてください。
- ・充電器を分解したり、改装したりしないでください。

◎故障かな？

- ・充電待機中LED表示が赤色点灯にならない:電源コードがしっかり差し込まれているか確認してください。
- ・電池に接続してもLED表示が橙色にならない:電池電圧が低すぎるか、充電配線が正しく接続されているか確認してください。
- ・充電中赤色LEDが点滅する:充電器の保護回路又はタイマーが動作しています。電源コード及び出力コードを抜き、充電器をリセットし電池を確認してください。

