


対象車種：CJSM2搭載のF3,F5VS,M3

車いすをロックするには・・・

- ・ コントローラーの電源が入っている状態で、On/Offボタンを押し続けてください。
- ・ 1秒後にコントローラーからビープ音を発します。ON/OFFボタンを離してください。
- ・ コントローラーがビープ音を発するまで、ジョイスティックを前方に移動させます。
- ・ コントローラーがビープ音を発するまで、ジョイスティックを逆方向に倒します。
- ・ ジョイスティックを離すと、長いビープ音が鳴ります。
- ・ 車いすがロックされました。

次回、本機の電源を入れたときには、以下の画面が表示されます。

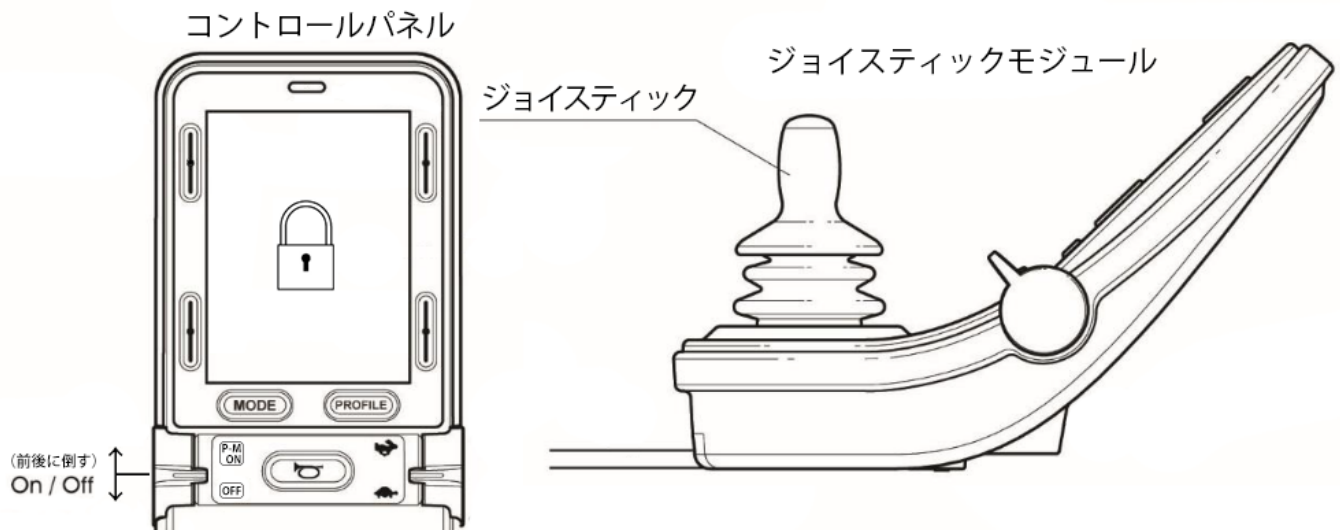

LEDジョイスティックモジュールが装着されていると、スピードインジケーターのLEDが左から右に波打つように点灯します。

車いすのロックを解除するには・・・


- ・ コントローラーの電源が切れている場合は、On/Offボタンを押してください。
- ・ コントローラーがビープ音を発するまで、ジョイスティックを前方に移動させます。
- ・ コントローラーがビープ音を発するまで、ジョイスティックを逆方向に倒します。
- ・ ジョイスティックを離すと、長いビープ音が鳴ります。
- ・ 車いすのロックが解除されました。

対象車種：VR2 搭載の M1

車いすをロックするには・・・

- ・ コントローラーの電源が入っている状態で、On/Offボタンを押し続けてください。
- ・ 1秒後にコントローラーからビープ音を発します。ON/OFFボタンを離してください。
- ・ コントローラーがビープ音を発するまで、ジョイスティックを前方に移動させます。
- ・ コントローラーがビープ音を発するまで、ジョイスティックを逆方向に倒します。
- ・ ジョイスティックを離すと、長いビープ音が鳴ります。
- ・ 車いすがロックされました。

次回、本機の電源を入れたときには、以下の画面が表示されます。

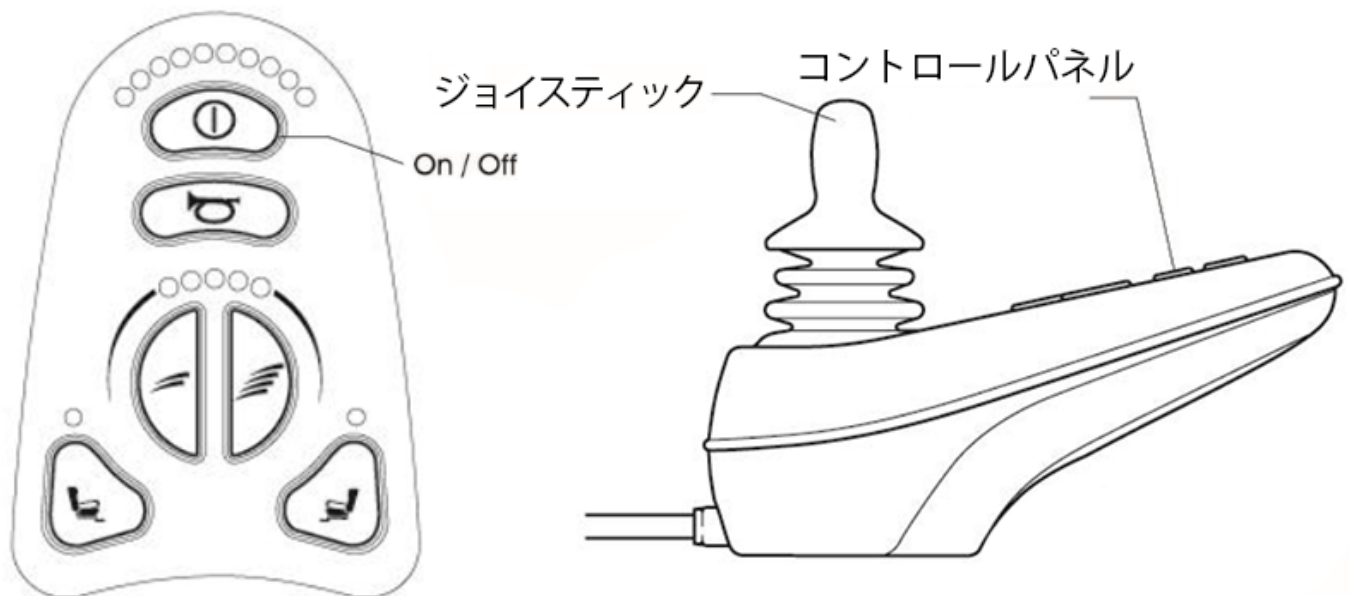

LED ジョイスティックモジュールが装着されていると、スピードインジケーターの LED が左から右に波打つように点灯します。

車いすのロックを解除するには・・・

- ・ コントローラーの電源が切れている場合は、On/Offボタンを押してください。
- ・ コントローラーがビープ音を発するまで、ジョイスティックを前方に移動させます。
- ・ コントローラーがビープ音を発するまで、ジョイスティックを逆方向に倒します。
- ・ ジョイスティックを離すと、長いビープ音が鳴ります。
- ・ 車いすのロックが解除されました。