



スマートドライブの利用適正及び安全運転指導チェックシート

販売店様は、スマートドライブの引き渡しをする際に、利用者様に対して下記のチェックシートに従って利用適性の判定と取り扱い方法の説明、並びに利用に際しての危険性について告知を行ってください。各項目完了後、販売店、利用者双方で虚偽なく確認欄に✓を記入してベルモビルへ提出してください。利用適正の判定において該当しない項目がある場合はスマートドライブのご利用、ご購入をお控えいただきますようお願いいたします。

 **警 告**

お客様の運転／操作練習には必ず販売承諾した担当者が同行してください。
不慣れな状態、知識不足の状態での運転/操作は重篤な怪我や事故を引き起こす恐れがあります。

チェック項目	利用者確認欄	販売店確認欄
1 スマートドライブ利用適正の判定		
自走式車いすを日常的に利用することができます。	☐	☐
ハンドリムによる走行、停止、旋回や方向転換、障害物回避ができます。	☐	☐
周囲の状況を正しく理解し、走行すべきかどうか判断することができます。	☐	☐
ハンドリムを握る、または押さえることで停止させることができます。	☐	☐
スピードコントロールダイヤルの操作を確実に行うことができます。	☐	☐
2 各部の取り扱い方法		
スマートドライブの取り付け		
車椅子へのクランプの取り付け方法を確認しました。	☐	☐
スマートドライブ本体の取り付け方法を確認しました。	☐	☐
運転操作する前の準備		
バッテリー残量の確認方法を確認しました。	☐	☐
スピードコントロールダイヤル各部の名称を確認しました。	☐	☐
スピードコントロールダイヤルの操作方法を確認しました。	☐	☐
3 運転操作に関する指導		
必要な時にはいつでも停止させることができます。	☐	☐
必要な時にはいつでも旋回することができます。	☐	☐
必要な時にはいつでも障害物を回避することができます。	☐	☐
傾斜、段差、路面状況を把握し安全なルートを選択することができます。	☐	☐
4 安全運転に関する指導		
警告事項の説明、安全運転の手引きを確認しました。	☐	☐
走行規則を確認しました。	☐	☐
障害物の乗り越えを確認しました。	☐	☐
下り坂での走行方法を確認しました。	☐	☐
上り坂での走行方法を確認しました。	☐	☐
横方向に傾いた路面での走行方法を確認しました。	☐	☐
5 その他		
充電の仕方について確認しました。	☐	☐
運搬の方法について確認しました。	☐	☐
航空機への積載について確認しました。	☐	☐
保管方法について確認しました。	☐	☐

上記確認内容に虚偽がないことをここに誓約いたします。
この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は確認すべき事項を確認しなかったことが判明した場合には、怪我や事故など当方が不利益を被ることとなって
も、異議は一切申し立てません。

年 月 日

販売店名

利用者氏名 印

担当者氏名 印

利用者住所