

飛行機にお乗りの方へ

事前に航空会社にスマートドライブの輸送について連絡が必要です。

ご連絡の際は、次ページの【製品の仕様】を航空会社にお知らせください。

スマートドライブに搭載のバッテリーは、輸送時の気圧や温度変化、振動の影響を受ける可能性があるため、航空機で安全に輸送するためのルールが国際規則および国内規則で定められています。詳しくは以下の国土交通省のページをご覧ください。

[電動車椅子で航空機を御利用される場合のルールについて \(PDF\)](#)



<http://www.mlit.go.jp/common/001005802.pdf>

また、**一部の機体ではスマートドライブの輸送ができない場合があります。必ず各航空会社にお問い合わせください。**

【製品の仕様】

資料を航空会社係員にお渡しいただくと手続きがスムーズです。

製品全体寸法（全長・全幅・全高）	38.9 cm x 14.1 cm x 24.2 cm
製品重量	約6.1kg
バッテリー種別	リチウムイオン （容量：3.4 Ah・電圧：36 V・取外し：不可・ワット時定格量：122 Wh 重さ：1.1 kg 【1.0 gr リチウム含有量】・個数：1個）

*バッテリーは、お客様とともに客室に持ち込み、安全に保管してください。

詳しくは航空会社に確認し、指示に従ってください。また、空港でのバッテリーの目視確認、絶縁、航空機への搭載には時間がかかる場合があります。空港には早めにご到着ください。

航空会社から証明書の提出を求められた際は

以下の証明書をダウンロードして、航空会社にご提出ください。

内容は、IATA（国際航空運送協会）が定める危険物輸送の試験要件をクリアしていることを示す書面となっております。

IATAに関する証明書（PDF）



<https://permobilkk.jp/download/657/>