

令和2年3月18日

お客様各位

ペルモビール株式会社
カスタマーサービス

スマートドライブ MX2+アプリの更新 (Ver. 1.0.01) のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2020年3月16日(月)にプッシュトラッカーE2用のSmartDrive MX2+アプリの更新についてお知らせします。今回、最初のVer.1.0.00からVer.1.0.01にアップデートされました。今回のアップデートの理由は主として利便性を目的としており安全性には関連していませんが、更新することを推奨しております。なお、3月16日14時以降にSmartDrive MX2+アプリを新たにインストールした場合は既に更新版になっております。SmartDrive MX2+アプリを更新する場合、自動更新(通常は夜間更新)されることが多いですが以下の方法で更新できます。

SmartDrive MX2+アプリの更新方法

最新のSmartDrive MX2+アプリの更新プログラムやその他のアプリの更新プログラムを入手するには、E2の「Playストア」からダウンロードします(Wi-Fi環境が必要です)。

1. スマートウォッチを起動します。
2. E2本体の右のボタンを押して、アプリの一覧を開きます。
3. 「Playストア」をタップします。Wi-Fiに接続し、Googleアカウントを追加します。
4. 画面下にスワイプしていき、[マイアプリ]をタップします。「アップデートあり」が表示された場合は、必要なものをダウンロードするか、[すべて更新]をタップします。

バージョン 1.0.01 での更新内容

1. 選択可能なオプションとしてスマートドライブ MX2+ ウォッチフェイスを追加しました。
2. 「パワーアシストタイムアウト」と、バッテリー寿命を改善するための設定を追加しました。
3. アプリのメイン画面にて、ページングの代わりにスムーズスクロールを使用することで操作性を良くしました。
4. 利用状況のメーター表記、タイムゾーン変更処理、ワイヤレスアップデートへのバグ修正。
5. 読み込み時間とパフォーマンスの向上。
6. スマートドライブのモーターが動いているときに「運転を非アクティブにする」ボタンを削除し、「パワーアシストオフをOFFにする」をタップするだけでスマートドライブを停止できるようになりました。
7. 意図しないトリプルタップの数を減らすためにタップ検出の改善をしました。

以上