

permobil

Mシリーズ（M1、F3、M5）の航空機積載方法について

1. 車体の確認（車体側面部／上面部）

車体側面部／上面部に車種が書かれているシールが貼られているのを確認してください。




2. 誤作動防止方法（車体後方部）

車体後方部にメインブレーカーのスイッチがありますので OFF にします。
メインブレーカーを OFF にすることで手元の操作機では電源が入らなくなり、誤作動を防止することができます。





3. ブレーキ解除方法（車体側面部）

車体側面部にブレーキリリースバーがありますので内側に切り替えますと手動になります。
車いすを移動した後は、必ずブレーキリリースバーを外側に戻してから車体が動かないことを確認してください。

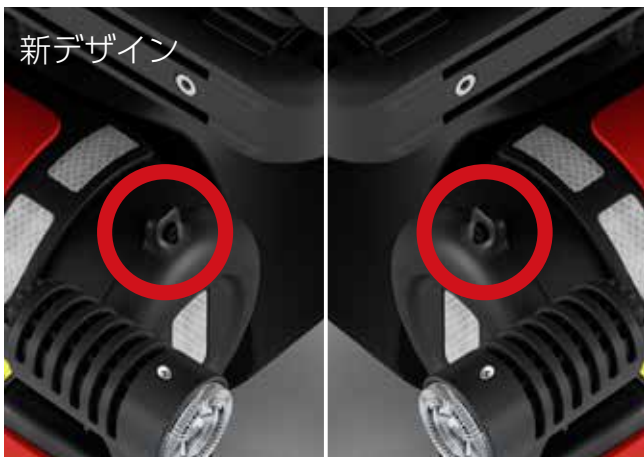

4. 車体固定方法（車体前後左右）

車いすの前後左右に車体を固定するためのフックが取り付けられています。

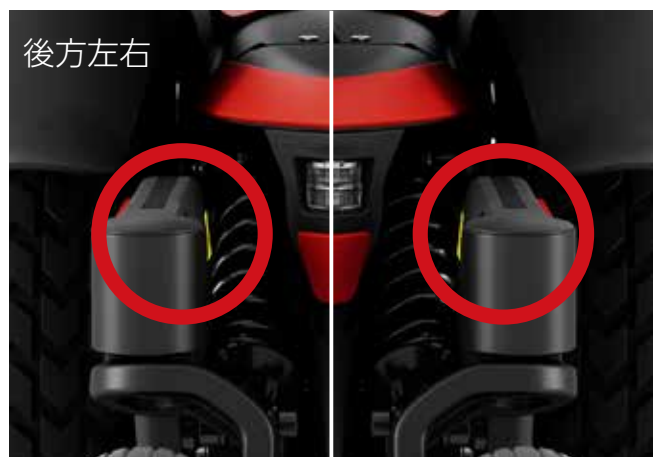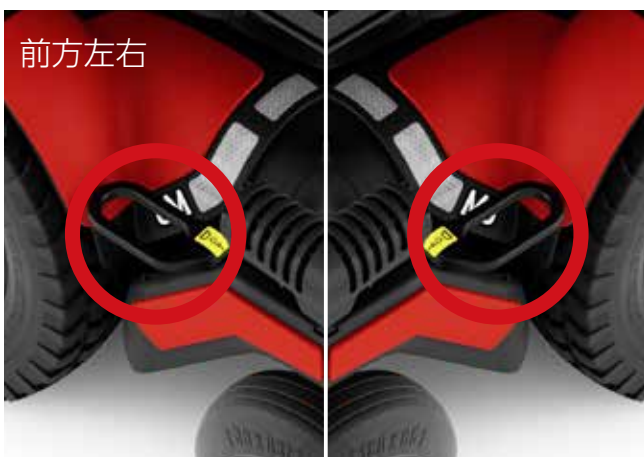

5. 搭載バッテリー確認方法（車体側面部）

車体側面部の隙間からバッテリーを直接確認することができます。



6. 搭載バッテリー種別（車体後方部）

車体後方部のキャストアームに貼られているステッカーからバッテリー詳細が確認できます。詳細な仕様書が必要な場合は、QRコードから情報を取得してください。



MK BATTERY M34SLDG
MK BATTERY M24SLDGFT

鉛/ゲル（航空機積載可能）
シールド（防漏/密閉型）

7. バックサポート折りたたみ方法（M1のみ）

バックサポート下部のシャフトを引き抜くことで前方向に折りたたむことができます。シャフトを引き抜きロックが外れる際に、カバー上部の保護を目的にハンカチなどを敷いてから行ってください。

