

パワーアシスト

SmartDrive MX2+



permobil

オンデマンド パワーアシスト

手動の車いすを漕ぐと言うことは肩や肘に負担がかかり、後々深刻な問題が生じる可能性があります。SmartDriveのパワーアシストは、漕ぐ力や回数を最大81%*削減し、反復的な負荷を最小限に抑えることが実証されています。SmartDriveを使う事により、『漕ぐ』から開放されることでしょう。

*SmartDriveのSmartEvaluationアプリから収集したデータに基づく



ほぼすべての手動車いすに簡単に取り付け可能な、マルチプエルゴノミックルハンドル



簡単に取り外し可能で持ち運びに最適

さまざまなコントロールオプションでプッシュを思い通りに


オムニホイールの設計(特許取得済み)は、どんな状態でも発進と走行が出来ます。最適なトラクションを維持して最大17度の傾斜まで登坂が可能です

6 kg - 世界最軽量のリアマウント型パワーアシスト



スピードコントロールダイヤル

外出先でも始動、停止、変速が可能

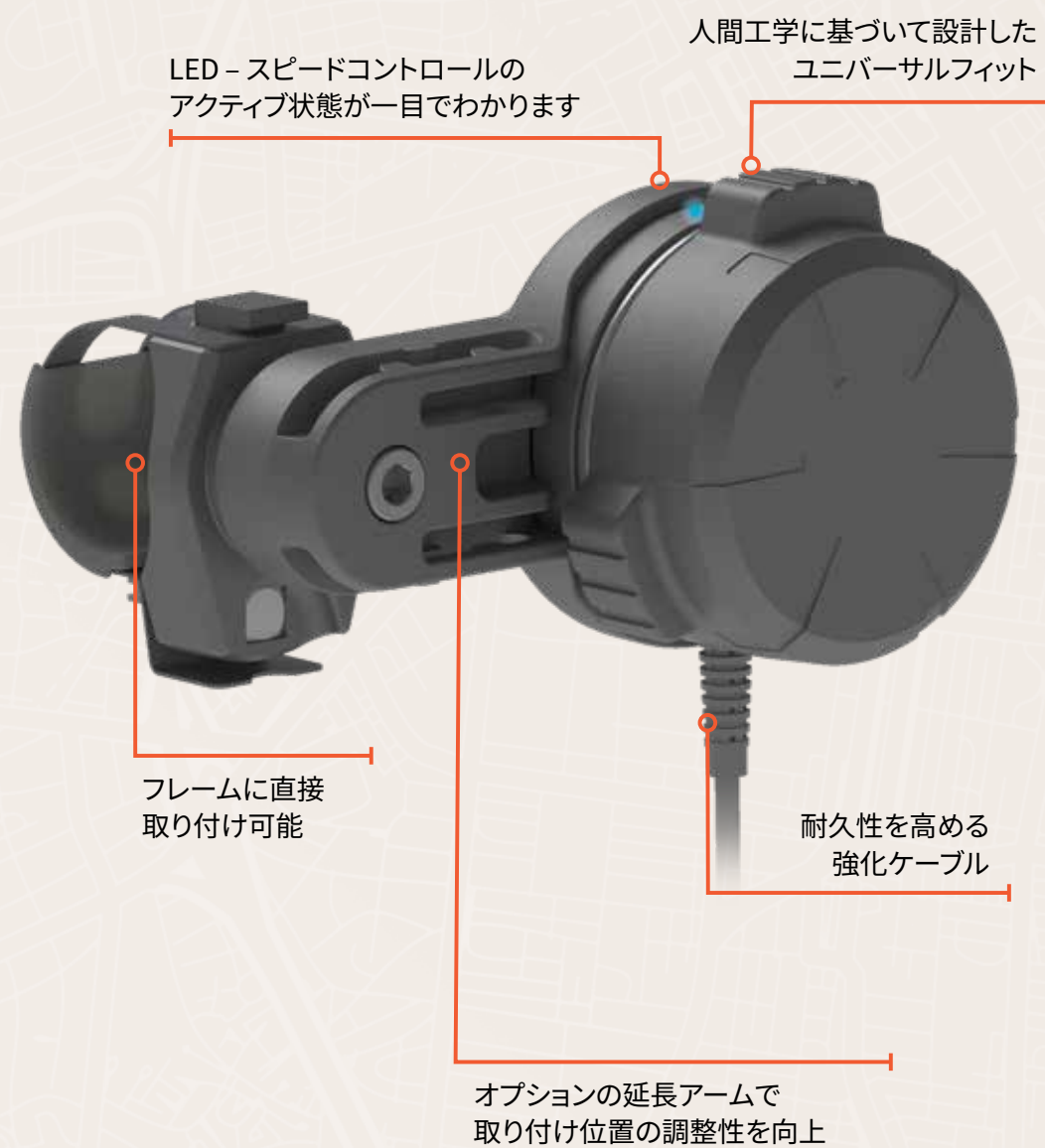

スピードコントロールダイヤル
は、簡単なインストールと設定で
すぐに使用できます。





Apple Watch

Apple Watch (Series 5以降)で
SmartDrive MX2+をコントロール
できるようになりました。

- 簡単で素早くセットアップ
- 見やすい画面
- バッテリー性能の向上
- App Storeから無料でダウンロード

Apple WatchおよびApp Storeは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。



スキャンしてSmartDrive
MX2+アプリをダウンロード



PushTracker E3

PushTracker E2はPushTracker E3
にアップデートされました。

PushTracker E3ではプロセッサの
アップグレードによりバッテリー性能
が向上しています。

- アプリはインストール済みなので短時間で簡単にお好みの設定が完了
- より小さく、より軽く、より快適
- バッテリー寿命が向上
- 応答性と効率性が向上

スイッチコントロールボタン

スイッチコントロールボタンを使えば、ボタンを押すだけでSmartDriveを簡単にコントロールできます。スイッチコントロールボタンはモメンタリーモードとラッチモードのどちらでも使用できます。イヤホンジャック式の外付けボタンも取り付け可能です。

モメンタリーモード

SmartDriveはどちらかのスイッチを握っている間だけ作動します。

ラッチモード

どちらかのスイッチを長押ししてクルーズ速度を設定します。停止する場合は、スイッチをタップしてホイールを長押しするだけです。

モノラルジャックオプション付きスイッチコントロールボタン

イヤホンジャック式の外付けボタンを使用してスイッチコントロールボタンを操作できます。差し込むだけで起動しますので、余分な設定は必要ありません。



スイッチコントロールボタン
フレームマウント



延長アーム付き
スピードコントロールダイヤル



Apple Watch
クラス最高のバッテリー寿命と
プレミアムなウェアラブル体験。

PushTracker E3
読み取りやすいタッチスクリーン

SwitchControl
各種の制御オプションを備え
たSmartDrive用有線ボタン

SmartDrive MX2+
斜面や厚いカーペット上の
移動、長距離の移動をパワ
ーアップ

スピードコントロール
ダイヤル
外出先でも簡単に始動、停止、速度変更が
可能。

プッシュを自由に

SmartDriveがあれば、手動車椅子ユーザーはこれまで以上に自由なコントロールが可能になります。当社の様々なハードウェアとソフトウェアソリューションを組み合わせることで、移動に関する皆様それぞれの目標をサポートします。

新しく改善したSmartDriveのコントロールオプションにより、これまでにないほど簡単にプッシュ回数を減らすことができます。

	SpeedControl Dial	SwitchControl	PushTracker E3	SmartDrive MX2+ App for Apple Watch
				
SmartDriveをご購入 いただくと無料	オプション	✓	✓	無料アプリ
Permobilが提供	✓	✓	✓	別途ご購入
プラグアンドプレイ	✓	✓		
5分以内にセットア ップ	✓	✓	✓	✓
プログラム可能な 設定	✓	✓	✓	✓
充電不要	✓	✓		
イヤホンジャック ポートオプション		✓		
SwitchControl と連携		✓	✓	✓
SpeedControl に対応	✓		✓	✓
有線制御オプション	✓	✓		
Wi-Fi不要	✓	✓	✓	✓
停止せずに速度を 増減	✓			



SmartDriveの仕様

寸法	長さ:	389 mm (15.3")
	幅:	141 mm (5.7")
	高さ:	242 mm (9.5")

製品重量	6 kg (13.2 lb) ドライブユニット
ユーザーの体重	14 to 150 kg (30 to 331 lb)
走行距離*	Up to 19.8 km (12.3 mil)
モーター電源	250W ブラシレスDCモーター
最大速度	8.8 km/h (5.5 mph)
動作温度	-25°C to 50°C (-13°F to 122°F)
椅子タイプの互換性	剛性、折りたたみ、チルトインスペース、片腕ドライブなど 椅子の幅: 8" (転倒防止なし) - 22"
駆動輪径	22", 24", 25", 26" (501, 540, 559, 590 mm)
保証	2年間の限定保証
Bluetooth LE	FCC ID QOQBT113 IC ID 5123A-BGTBLE113

*性能の数値はユーザーと椅子の特性、運転、バッテリーの状態などにより異なります。

SmartDriveは、車椅子に関するANSI/RESNA規格 - Volume 1およびVolume 2およびEN 12184の全適用要件に対してテストされ、そのすべてに合格しています。

注: SmartDriveの追加により、メーカーが提供する車椅子の仕様が若干影響を受ける場合があります。

操作とお手入れについて、詳しくはオーナーズマニュアルを参照してください。

スマートドライブの価格はお近くの販売店にお問い合わせください。